

NÁVOD K OBSLUZE

KANGOO CLASSIC

KANGOO VARIO



www.kangoo-reha.de



Obsah

1.	Identifikace modelu a okolní podmínky	3
11.	Identifikace modelu	3
12.	Okolní podmínky	3
2.	Všeobecné informace	3
21.	Předmluva	3
22.	Účel použití	3
23.	Oblast použití	4
24.	Prohlášení o shodě	4
25.	Schválení	4
26.	Záruka	4
27.	Informační povinnost pro obtížné případy	4
28.	Bezpečnost výrobku / dotazy na výrobek	5
3.	Bezpečnostní pokyny	5
31.	Význam symbolů	5
32.	Všeobecné bezpečnostní pokyny	5
33.	Bezpečnostní pokyny pro přívěs jízdního kola	6
34.	Bezpečnostní pokyny k upínacím bodům	7
4.	Dodání a zajištění použitelnosti	8
41.	Dodání a základní výbava	8
42.	Montáž kočárku KANGOO	9
43.	Složení kočárku KANGOO	10
44.	Přeprava v zavazadlovém prostoru	11
5.	Funkce	11
51.	Kočárek Reha	11
52.	Sklon sedačky a tlumič	11
53.	Bubnové brzdy včetně aretace	12
54.	Výškové nastavení madla	12
55.	Nožní opěra modelu KANGOO CLASSIC	12
56.	Úhlově nastavitelná nožní opěra modelu KANGOO VARIO	12
57.	Přívěs za jízdní kolo	12
6.	Příslušenství	12
61.	Zkrácení / prodloužení nožní opěry u modelu KANGOO CLASSIC	13
62.	Nožní aretace pro KANGOO CLASSIC	13
63.	Výsuvná jednotka KANGOO VARIO	13
64.	Úložný box	13
65.	Úložná taška	13
66.	Blatníky	13
67.	Poklice kola	14
68.	Svislé zdvihové zařízení [jen rozměr 3]	14
69.	Řiditelné přední kolo	14
610.	Pomocná opěra	14
611.	Opěra proti převrácení	14
612.	Opěrka hlavy z polyuretanu [PU]	14
613.	Sluneční střeška s moskytiérou	15

6.14.	Plášťenka.....	15
6.15.	Volitelné lyže	15
7.	Systémy popruhů.....	15
7.1.	5 bodový zádržný popruh	16
7.2.	5-bodový bezpečnostní pás, široký pás s bezpečnostním zámkem	16
7.3.	Hrudní - ramenní popruhy	16
7.4.	Sedákový popruh	16
7.5.	Pánevní pás, s volitelným plastovým nebo kovovým zámkem	16
7.6.	Chrániče popruhů	17
8.	Polštář pro přizpůsobení sedící polohy.....	17
8.1.	Sedákový klín s / bez abdukčního klínu.....	17
8.2.	Zádový klín 2 dílný.....	17
8.3.	Hrudní pelota	17
8.4.	Pánevní pelota včetně vedení nohou [krátká / dlouhá].....	17
8.5.	Loketní opěra s pánevní pelotou	18
8.6.	Hlavový klín s / bez bočního vedení	18
8.7.	Kolenní válec.....	18
8.8.	Lýtková opěra CLASSIC/VARIO.....	18
9.	Volitelné připojení za jízdní kolo	18
9.1.	Sada osvětlení.....	19
9.2.	Vlajka pro jízdu za jízdním kolem	19
9.3.	Spojka pro jízdní kolo	19
9.4.	Oj pro připojení k jízdnímu kolu	19
10.	Upínací body.....	20
11.	Údržba a ošetřování	21
11.1.	Údržba.....	21
11.2.	Tipy pro ošetřování.....	21
12.	Technický popis	22
13.	Technická data.....	22

1. Identifikace modelu a okolní podmínky

1.1. Identifikace modelu

Typový štítek naleznete vlevo dole na spodním rámu, sériové číslo je umístěno na pravé straně. Na skořepině sedadla naleznete tyto informace vzadu uprostřed.



Zde naleznete:

- Modelové označení a sériové číslo
- Informace o nosnosti
- Země výroby
- Značka CE
- Výrobce
- Odkaz na návod k obsluze

a:

- Výrobce
- Kontaktní údaje
- Země výroby
- Značka CE
- Povinné bezpečnostní pokyny
- Lékařský výrobek

1.2. Okolní podmínky

Pro zabránění poškození vzdušnou vlhkostí a teplotou doporučujeme používat kočárek KANGOO v rozsahu okolních teplot od -15 °C do +45 °C a při nekondenzující vlhkosti vzduchu od 5 % do 100 %.

2. Všeobecné informace

2.1. Předmluva

Blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro náš kočárek Reha KANGOO, vysoce kvalitní výrobek, který vám bude dlouho dobře sloužit. Multifunkčnost kočárku KANGOO vám zajistí terénní vlastnosti i možnost připojení za jízdní kolo v jednom.

Tento návod k obsluze vám poskytne pokyny ke správné obsluze výrobku.

Pro zabránění poškození v důsledku chyb obsluhy a umožnění optimálního používání si prosím přečtete následující návody a pokyny.

Budete-li mít další dotazy, je vám rád kdykoli k dispozici náš tým a váš odborný prodejce.

Vyhrazujeme si právo na technické změny provedení, popsaného v tomto návodu k obsluze.

2.2. Účel použití

Použití kočárku Reha je nutné pro přepravu imobilních, těžce tělesně postižených osob, hlavně dětí a mladistvých, které z důvodu svého postižení nejsou schopné samostatně používat invalidní vozík. KANGOO rovněž umožňuje dosažení cílů, které nejsou dosažitelné běžnými invalidními vozíky.

Opětovné použití kočárku KANGOO je možné. Po důkladném vyčištění a dezinfekci je možno kočárek nabídnout autorizovanému odbornému prodejci. Ten zkontroluje stav a případné opotřebení, poškození a závady, které je nutno odstranit.

2.3. Oblast použití

Množství variant vybavení a modulární konstrukce umožňuje použití při:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| - Rozsah poškození v důsledku autismu | - Dětský revmatismus |
| - Angelmanův syndrom | - Rakovina |
| - Vývojové poruchy | - Ochrnutí |
| - Neschopnost chůze / imobilita | - Roztroušená skleróza |
| - Genetická onemocnění | - Rettův syndrom |
| - Svalová atrofie | - Zraková postižení nebo slepota |
| - Vady nebo znetvoření končetin | - Křeče |
| - Kontraktury kloubů | - Spinální svalová atrofie [SMA] |
| - Poškození kloubů | - Traumatická poškození mozku |
| - Kardiologická a plicní onemocnění | - Ostatní onemocnění |

2.4. Prohlášení o shodě

BoGeTec GmbH prohlašuje jako výrobce na vlastní odpovědnost, že kočárek Reha KANGOO splňuje požadavky směrnice EU 2G17/745.

BoGeTec GmbH prohlašuje dodržení shody CE pro lékařské výrobky třídy 1.

Odpovídající prohlášení je přiloženo k vašemu kočárku.

Životnost kočárku KANGOO je při odborném používání a řádné údržbě stanovena na 7 let. Další pokyny k údržbě naleznete v kapitole 11.

2.5. Schválení

Registrační číslo podle zákona o lékařských výrobcích je DE/CA4Q/QQ528/1, a je přiděleno registračním prezidiem Tübingen.

Kočárek Reha KANGOO CLASSIC / VARIO je dále zanesen pod číslem 18.99.01.2044 v seznamu pomůcek.

2.6. Záruka

Dodržujeme zákonné záruční podmínky. Nedbalé chování může vést k zániku záruky. Pokud v záruční lhůtě dojde k závadě, která není způsobena neodborným použitím nebo vnějšími vlivy, odstraníme ji.

Pokud existuje důvod k reklamaci mimo záruční lhůtu, doporučujeme vám obrátit se na vašeho odborného prodejce. Vždy máme zájem na nalezení společného řešení.

2.7. Informační povinnost pro obtížné případy


Obtížné případy, definované normou EU 2017/745, je nutno neprodleně hlásit odbornému prodejci, výrobci a příslušnému úřadu.

2.8. Bezpečnost výrobku / dotazy na výrobek

Pokyny k bezpečnosti nebo dotazům na váš kočárek KANGOO obdržíte u svého prodejce nebo přímo u výrobce na webu www.KANGOO-reha.de.

3. Bezpečnostní pokyny

3.1. Význam symbolů

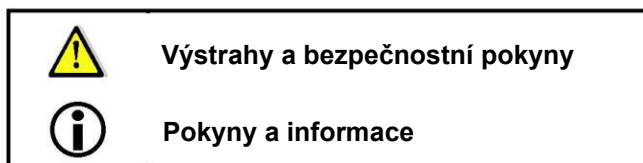

3.2. Všeobecné bezpečnostní pokyny



Nejdříve si přečtěte návod k použití!



Před použitím se seznámte se zacházením a funkcí výrobku a s jeho bezpečným používáním.



Jste odpovědní za bezpečnost svého dítěte. Bezpečnost vašeho dítěte může být ovlivněna při nedodržování těchto pokynů. Přesto není možno zahrnout všechny možné vznikající podmínky a nepředvídatelné situace. Rozum, opatrnost a předvídavost jsou faktory, které tento výrobek není schopen zaručit; jsou předpokládány u uživatele výrobku. Uživatel kočárku Reha musí pochopit všechny pokyny. Každá osoba, která používá kočárek Reha, musí být poučena o obsluze. Pokud jsou pokyny nesrozumitelné a jsou zapotřebí další vysvětlení, nebo pokud máte další dotazy, obraťte se na náš tým nebo na svého odborného prodejce.



Kočárek KANGOO není vhodný pro děti mladší 6 měsíců!



Kočárek Reha je schválený jen pro řádnou přepravu dítěte.



Kočárek KANGOO Reha je koncipovaný tak, aby rostl se svým cestujícím a přizpůsoboval se jeho měnícím se potřebám. Kontrolujte prosím v pravidelných intervalech přizpůsobení a poraďte se případně se svým odborným poradcem Reha.



Čalounění skořepiny sedačky a veškeré přídatné čalounění je těžko zápalné. Žhavé předměty a otevřený oheň však stále představuje nebezpečí pro uživatele.



Děti zásadně upněte pásem a nikdy nenechávejte bez dozoru.



Před vyjmutím nebo usazením dítěte vždy zabrzděte brzdy!



Před každým použitím je nutno opět utáhnout všechny povolené šrouby a rychloupínací prvky.



Zkontrolujte také výsuvné čepy zadních kol.



Boční zatížení poškozuje váš kočárek KANGOO.



Zavěšování zatížení na madlo, jako jsou tašky apod. může mít negativní vliv na stabilitu.



Tlak v pneumatikách je nutno pravidelně kontrolovat, měl by odpovídat doporučené hodnotě 3,5 baru.



Dodržujte prosím údaj, uvedený na pneumatice.



Při jízdě do a ze svahu buďte opatrní:

- Hrozí vypadnutí dítěte.
- Převrácení kočárku Reha
- Rozjetí kočárku Reha



Vyhnete se překonávání stupňů a prahů přední částí podvozku, kočárek k tomu vždy nakloňte.

[nahoru: táhněte vzad; dolů: spusťte vpřed]



V případě nutnosti prosím používejte výtahy nebo jiné pomůcky. Pokud tyto nejsou k dispozici, musejí kočárek KANGOO nést dvě osoby.



Ke zvedání kočárku KANGOO se nejlépe hodí spodní rám a rám sedačky. Tyto díly jsou pevně namontované.



Díly kočárku KANGOO se mohou silně zahřívat slunečním zářením. Před použitím prosím zkontrolujte teplotu.



Obaly ukládejte mimo dosah dětí. Při používání plastových obalů hrozí riziko udušení. Všechny obalové materiály, jako například fólie, kabelové spojky, styropor je nutno okamžitě zlikvidovat.



Likvidace obalu musí proběhnout podle národních zákonných ustanovení. Cenné suroviny je nutno předat k recyklaci. S dotazy na vhodné firmy pro zpracování odpadu se prosím obraťte na místní městská nebo obecní zastupitelstva.



Při poškození obalu je nutno okamžitě zkontrolovat možné poškození kočárku KANGOO.



Světlé oblečení a odrazky chrání dítě a uživatele ve tmě.



Nožní opěra je určena k opření, případně fixaci nohou a nesmí se používat k nastupování a vystupování.



Dodržujte přípustná zatížení [viz také: technická data].

3.3. Bezpečnostní pokyny pro přívěs jízdního kola



Dodržte před KAŽDOU jízdou!



Ujistěte se, že všechny uzávěry, aretace a šrouby jsou pevně utažené.



Doporučujeme, aby jak cyklista tak i cestující v kočárku KANGOO používal cyklistickou přílbu.



Osoba v kočárku KANGOO musí být zajištěná vhodným systémem bezpečnostních pásů.



Bezpečnostní lanko je nutno upevnit k jízdnímu kolu.



Při použití ve funkci přívěsu za jízdním kolem nechte vždy odbrzděnou parkovací brzdu.

Pamatujte na to, že jízdní vlastnosti při připojeném přívěsu kola se výrazně změní:



- větší poloměr zatažení
- větší rozchod
- snížený brzdný účinek [především při jízdě ze svahu]
- v důsledku větší celkové hmotnosti.



Při jízdě s přívěsem se vyhněte přejíždění překážek [kamenů, větví, výtluků atd.].



Doporučujeme seznámit se s jízdou s přívěsem nejdříve cvičně BEZ usazené osoby na rovném podkladě a později i v terénu.



Zvláště v zatáčkách je nutno dbát na přiměřenou rychlost!



Snížení tlumiče / tlumičů je nevyhnutelné.



Dodržujte prosím montážní návod.

3.4. Bezpečnostní pokyny k upínacím bodům



Kočárek KANGOO CLASSIC / VARIO byl úspěšně testován podle mezinárodní normy ISO 7176/19. Zda je vaše konfigurace vhodná pro přepravu v autě poznáte podle symbolu pro upínovací bod na svém kočárku KANGOO.



Navzdory úspěšně absolvované bariérové zkoušce je nutno vždy dát přednost ve vozidle pevně namontovaným sedačkám a zádržným systémům. Kočárek přesvědčí vlastnostmi, jako je funkčnost a flexibilita, nedosahuje ale stejné stability, jako přišroubované systémy sedaček.



Pro zajištění při přepravě je vždy nutno používat námi dodávané zádržné systémy. Ty jsou naléhavě zapotřebí při každé jízdě!



Kočárek KANGOO musí být ve vozidle zajištěný zádržným systémem podle ISO10542. Vždy dodržujte návod k použití od výrobce.



Popruhy pro zajištění cestujícího a kočárku KANGOO jsou stanovené námi. Pro zabránění těžkým úrazům je nutno tyto pokyny bezpodmínečně dodržovat.



Je nutno zajistit, aby popruhy nebyly poškozené ani překroucené. Musejí těsně přiléhat a být pevně usazené. Sklouznutí nesmí být možné. Pravidelnými kontrolami je nutno vyloučit používání opotřeбенých popruhů.



Skořepinu sedačky nastavte do vzpřímené polohy. Popruh, spojující rám sedačky se spodním rámem, je předem nastavený a musí být napnutý.



Nožní opěry nastavte do úhlu 90° [jen KANG00 VARIO].



Nárazový test byl proveden v dopředné poloze. Boční poloha není přípustná.



Parkovací brzda kočárku KANGOO musí být během jízdy zabrzděná.



Před každou jízdou odstraňte případně upevněné posuvné pomůcky a díly příslušenství.



Při montáži cizích systémů na kočárek KANGOO zaniká záruka. Stejně tak i při provedení neschválených úprav.



Zámky použitých pásů osobního zádržného systému je nutno nastavit tak, aby v případě nehody nemohlo dojít k jejich odjištění díly kočárku.



Pokud dojde k nehodě, je nutno kočárek vyměnit.



Při přepravě invalidních vozíků a osob v motorových vozidlech je nutno dodržovat následující normy: • DIN EN 12183: Požadavky na ruční invalidní vozíky. • ISO 7176-19: Požadavky na čelní náraz invalidního vozíku, aby tento mohl být schválený jako sedačka v motorovém vozidle. • ISO10542-1: Požadavky a zkušební metody na upevňovací systém invalidního vozíku a zádržný systém osob. • DIN 75078-2: Požadavky na motorová vozidla pro přepravu osob se sníženou pohyblivostí na invalidním vozíku [KMP]

4. **Dodání a zajištění použitelnosti**

4.1. **Dodání a základní výbava**



Svůj kočárek KANGOO obdržíte ve dvou zásilacích krabicích:

- Rozměr 1 a 2: po 90x60x58 cm
- Rozměr 3: 100x60x64 cm a 90x60x58 cm

Z technických důvodů zásilky je možné, že krabice budou individuálně přizpůsobené kočárku a tím se rozměry obalu zmenší.

Rovněž je možný dodatečný balík pro objednané příslušenství.

Obdržíte následující díly:

- podvozek
- skořepina sedačky
- 1 přední kolo 20"
- 2 zadní kola 20"
- úložná taška
- sluneční střeška bez moskytiéry
- návod k obsluze
- příslušenství podle objednávky

4.2. Montáž kočárku KANGOO



Podvozek opatrně vyjměte z obalu a sejměte vnější ochranný materiál. Podvozek opatrně položte na plochu na stabilní podklad, jako například na podlahu.

Zvedněte spodní díl rámu sedačky. Tlumič vyklopte nahoru.

i Poznámka: u rozměru 3 jsou namontované dva tlumiče.

Horní díl madla překlopte nahoru o 180°.

Tlumič zasuňte do držáku a bezpečně ho v něm zajistěte pomocí upínací páky. Aretace tlumiče musí směřovat vzhůru.

i Poznámka: upínací sílu je možno nastavit otáčením rýhovaného šroubu vlevo od páky.



Zadní kola s výsuvnými čepy nasadíte na doraz do trubky zadní nápravy. K tomu výsuvný čep odjistíte. K tomu stiskněte černé tlačítko.

i Poznámka: čep je správně zajištěný, když je tlačítko opět vysunuté.

Přední kolo nasadíte do vidlice a rychloupínací páku otočte směrem k zadním kolům a silně přitlačte.

i Poznámka: pro usnadnění montáže předního kola opatrně naklopte kočárek KANGOO pomocí madla směrem vzad.



Skořepinu sedačky volně položte na třmen sedačky a madlo.


Po uvolnění upínacích lišt na bočním čalounění se upínací čepy zasunou do odpovídajících otvorů ve skořepině sedačky a posuvném rámu. Zapadnutí je jasně slyšitelné.

Spony čepů musejí směřovat ven, aby byly aretované.

Následným nasazením čalounění jsou upínací čepy zajištěné ve své poloze.

i Poznámka: u rozměru 1 a 2 je skořepina sedačky zajištěna dole pomocí dlouhých černých čepů, nahoře pomocí krátkých stříbrných čepů. U rozměru 3 je použita jen stříbrná varianta.

4.3. Složení kočárku KANGOO

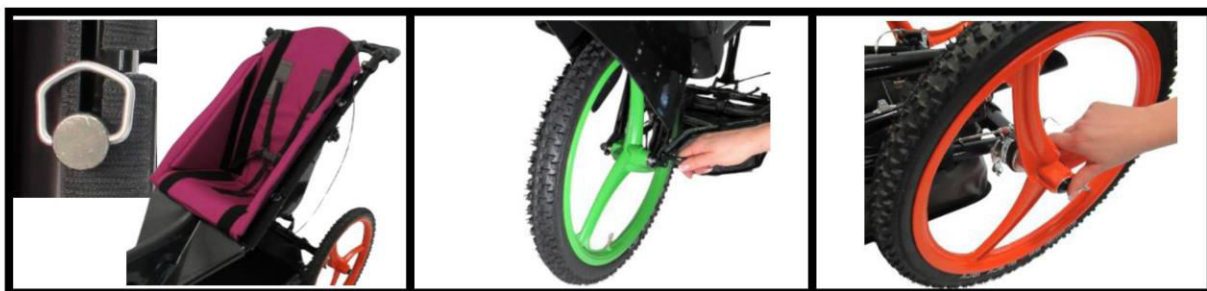

Uvolněte suchý zip na boku skořepiny sedačky a spony čepů otočte o 90°. Čepy a skořepinu sedačky je nyní možno sejmut.

Přední kolo sejměte po uvolnění rychloupínací páky.

Jednou rukou uchopte spodní rám kočárku KANGOO a druhou rukou stiskněte tlačítko na zadním kole pro uvolnění nasazovacího čepu. Tak je možno kolo bez problémů sejmut. Postup opakujte na druhé straně.

i Poznámka: po sejmutí zadních kol se již nesmí zabrzdřit parkovací brzda. To by mohlo vést k poškození brzdícího prvku.




Uvolněte rychloupínač držáku tlumiče a tlumič vyklopte z držáku.

Nyní je možno rám sedačky sklopit na kloubových spojkách. Pro kompletní složení kočárku je nutno povolit upínací šrouby výškového nastavení madla.

Madlo zasuňte do předního dílu kočárku pod kryty kol. Sklopte tlumič. Při kompletním složení kočárku musí být tlumič pod madlem.

4.4. Přeprava v zavazadlovém prostoru

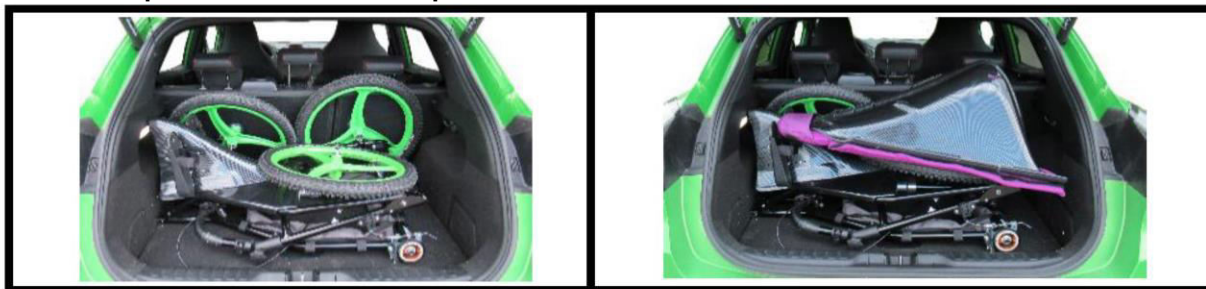

Kočárek KANGOO je možno rozložit a složit několika pohyby a dosáhnout tak rozměrů, které se vejdou skoro do každého zavazadlového prostoru.

K tomu sejměte kola a sestavu skořepiny sedačky a kočárek složte [viz kapitola 4.3 montáž].

5. Funkce

5.1. Kočárek Reha

Ve standardním provedení je možno kočárek KANGOO používat jako dětský skládací kočárek Reha. Se svými 20" koly vám umožní jízdu v lese, na louce a pláži a zajistí tak zážitek volné přírody. Tlumič chrání cestujícího před nárazy a otřesy na nerovném terénu.


5.2. Sklon sedačky a tlumič

Sklon sedačky je možno nastavit na držáku tlumiče, po povolení upínací páky. Tlumič poklesne v závislosti na zatížení ve vedení tyče. Držák by proto měl být v minimální vzdálenosti asi 5 cm od upnutí tyče.



5.3. Bubnové brzdy včetně aretace

Umožňují obsluhující osobě bezpečné a pohodlné zabrzdění. Zadní kola jsou snímatelná pomocí systému výsuvných čepů. Pro zabrzdění nastavte unášecí páku [malou, viz obrázek] s brzdovou pákou vzad, až stříbrné tlačítko slyšitelně zapadne. Pro odbrzdění zatáhněte za brzdovou páku a přitom druhou rukou vytáhněte [odjistěte] stříbrné tlačítko.

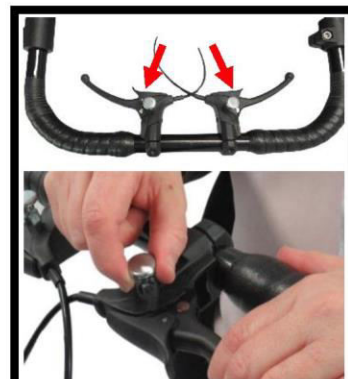

5.4. Výškové nastavení madla

Polohu madla je možno přizpůsobit uživateli. K tomu povolte boční upínací šrouby a nastavte příjemnou polohu. Doporučujeme nastavit madlo do výšky pupku doprovázející osoby, aby při používání kočárku KANGOO nedocházelo k nadměrnému namáhání zad. Potom šrouby opět pevně utáhněte.



Poznámka: polohovací kloub je nutno správně zaaretovat.

Kovové ozubení musí navzájem zcela zapadnout, aby se zabránilo zbytečnému opotřebení.

5.5. Nožní opěra modelu KANGOO CLASSIC

Nožní opěry je nutno umístit vlevo a vpravo na přední část krytů kol. K tomu zasuňte šrouby zvenku do kovového těmenu nožní opěry a otvorů v krytu kola. Pak zevnitř našroubujte matice a utáhněte je maticovým klíčem. Pro nastavení polohy nožních opěr je v krytu kola určeno několik otvorů. Povolněním přední křídlové matice na spodní straně opěry nohy je možno pouzdro nohy vykloupat ven.



5.6. Úhlově nastavitelná nožní opěra modelu KANGOO VARIO

Nožní opěry je nutno umístit vlevo a vpravo na rám sedadla. Nejdříve je nutno povolit na krytu kola namontovaný šroub s čochkovou hlavou a potom zajistit úhlovou polohu nožní opěry.



5.7. Přívěs za jízdní kolo

Kočárek KANGOO je také možno používat jako přívěs za jízdní kolo. Podrobný popis použití a montáže naleznete v kapitole Příslušenství - volitelné připojení za kolo.



6. Příslušenství

Veškeré příslušenství se dodává v montážních sadách. Všechny díly příslušenství je nutno, pokud ještě nejsou instalované z výroby, nechat namontovat vyškoleným odborným personálem.

6.1. Zkrácení / prodloužení nožní opěry u modelu KANGOO CLASSIC

Nejdříve v závislosti na účelu [zkrácení nebo prodloužení] přišroubujte plechy na kovové třmeny nožních opěr. Šrouby protáhněte podélnými otvory v pleších a otvory v krytu kola. Pak zevnitř našroubujte matice a utáhněte je maticovým klíčem.

6.2. Nožní aretace pro KANGOO CLASSIC

Existují lékařské indikace, vyžadující použití aretace. Aretace je pevně upevněna k nožnímu pouzdru, dá se ale individuálně přizpůsobit seřizovacími prvky.

6.3. Výsuvná jednotka KANGOO VARIO

Výsuvná jednotka se dodává předem namontovaná na nožní opěry. Pro přizpůsobení sedící osobě povolte 4 šrouby na přední straně a opěru nohy nastavte do potřebné výšky. Jemné nastavení se provádí pomocí křídlových matic na zadní straně.

6.4. Úložný box

Úložný box je vložený ve spodním rámu a není nutno ho nijak upevňovat.

 **Poznámka:** maximální nosnost je 15 kg.

6.5. Úložná taška


Úložná taška se upevňuje na spodní rám pomocí suchého zipu. Dodává se s a bez víka.

 **Poznámka:** maximální nosnost je 4 kg.

6.6. Blatníky

Připojovací čep blatníku zasuněte do předmontovaného držáku. Držák je namontovaný na nosné desce brzdy. Při správném zapadnutí blatníku se ozve „cvaknutí“.

 **Poznámka:** blatníky jsou kompatibilní s naší standardní velikostí kola 20", ne s hnacími koly [koly s ozubeným věncem].

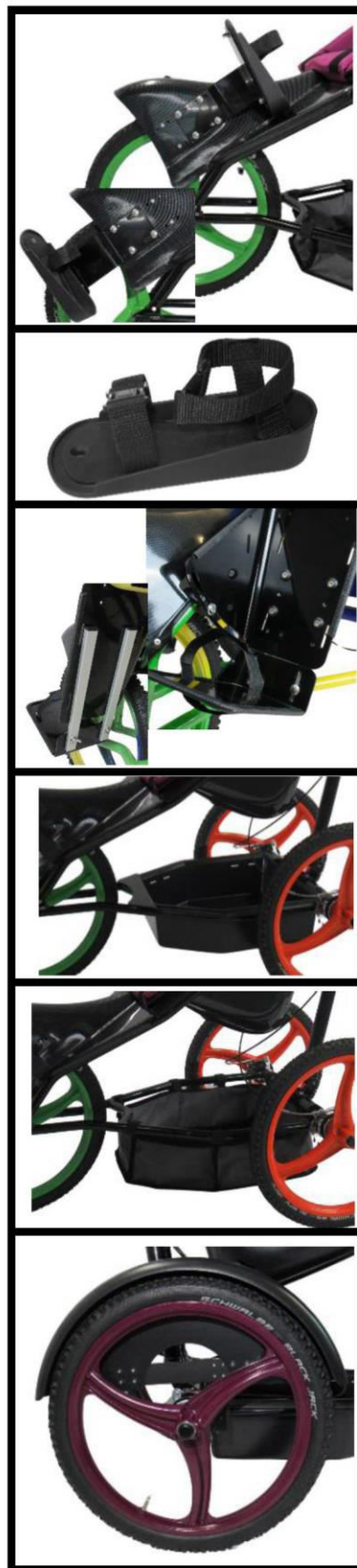

6.7. Poklice kola

Makrolonovou poklici kola nastavte do stanovené polohy. Poklici upevněte protažením kabelových spojek příslušnými otvory.

6.8. Svislé zdvihové zařízení [jen rozměr 3]

Zdvihové zařízení je k dispozici jen pro rozměr 3. Pro přizpůsobení sklonu sedačky je možno s jeho pomocí kočárek KANGOO bezpečně spustit a opět zvednout.



Poznámka: rychloupínače pro upevnění tlumičů se nesmějí používat v kombinaci se zdvihovým zařízením.

6.9. Řiditelné přední kolo

Po demontáži 20" předního kola jednoduše zasuňte držák řiditelného předního kola do vidlice. Pak řiditelné přední kolo zajistěte rychloupínací pákou.

6.10. Pomocná opěra

Pomocná opěra usnadňuje montáž příslušenství pro jízdní kolo a výměnu předního kola.

Pomocnou opěru namontujte podle obrázku bočně na spodní rám. Před jízdou s kočárkem KANGOO je nutno opěru vždy sklopit do klidové polohy.

6.11. Opěra proti převrácení

Zajištění proti převrácení chrání osobu sedící v kočárku a kočárek KANGOO před převrácením dozadu a montuje se na spodní rám mezi kola. Výška nad zemí se dá plynule nastavit.

6.12. Opěrka hlavy z polyuretanu [PU]

Na zadní straně skořepiny sedačky je upevněna opěrka hlavy, která nabízí optimální pohodlí a spolehlivé opření hlavy a krku. Díky vysoce kvalitnímu PU čalounění se ideálně přizpůsobí tvaru hlavy a podporuje příjemnou a ergonomickou polohu sezení.



6.13. Sluneční střecha s moskytiérou



Držáky rámu sluneční střechy zasuňte vpravo a vlevo do k tomu určených upevňovacích dílů na rámu, stranou se zipem ve směru jízdy. Po správném zapadnutí držáků uvolněte pojistku na zadní straně sluneční střechy, střechu přetáhněte přes skořepinu sedačky a opět upevněte.

Poutko upevněte sponou moskytiéry k rámu sedačky. K tomu sejměte skořepinu sedačky. Moskytiéra je spojená se sluneční střechou pomocí zipu. Pak ji přetáhněte přes kryty kol. Sponu upevněte ke k tomu určenému poutku.

6.14. Pláštěnka

Pláštěnka se položí přes napnutou sluneční střechu a upevní přišitým suchým zipem.

Nožní díl se přetáhne přes kryty kol.



Poznámka: doporučujeme použití v kombinaci se sluneční střechou. Pokud ne, je nutno tyče objednat samostatně.



6.15. Volitelné lyže

Pro milovníky zimních sportů se v programu příslušenství pro kočárky Reha KANGOO nabízí příslušenství pro běh na lyžích. Kola se přitom vloží do držáků lyží a zajistí upínacím popruhem.

7. Systémy popruhů

Kočárek Reha KANGOO se hodí k přizpůsobení pro množství systémů popruhů. Pásky na dílech příslušenství jsou většinou velkoryse dimenzované pro splnění všech možností. Po provedení individuálního přizpůsobení zkrátte přebytečné konce popruhů příslušenství.

Zatavením řezné hrany [například zapalovačem] je možno konec popruhu chránit proti roztřepení.

Sedící osobu je nutno zajistit popruhem, jakmile sedí v kočárku KANGOO.

Popruhy protáhněte podle obrázků a v závislosti na tělesných rozměrech sedící osoby čalouněním a skořepinou sedačky. Pro přizpůsobení délky popruhu jsou na skořepině sedačky umístěny sklopné spony, kterými je nutno protáhnout konce popruhů a zajistit. Nadměrné konce popruhů je možno zkrátit nůžkami.

7.1. 5 bodový zádržný popruh

5 bodový zádržný popruh bezpečně drží sedící osobu, aniž by ji omezoval v pohybu. Díky individuálním možnostem přizpůsobení představuje řešení pro různé věkové skupiny.

Přiložené zádržné lanko je nutno upevnit ke kočárku KANGOO podle obrázku, druhý konec je nutno pevně, ale pohodlně omotat kolem zápěstí.



7.2. 5-bodový bezpečnostní pás, široký pás s bezpečnostním zámkem

Široké pásy zajišťují sedící osobě zvýšené pohodlí. Tlakové body na styčných plochách jsou minimalizovány, zatížení je rovnoměrně rozloženo.



Poznámka: pro upevnění systému širokých pásů je nutné vytáhnout pánevní pás ze spony. Potom pás protáhněte bočními štěrbinami a opět zatáhněte do seřizovacího dílu.



7.3. Hrudní-ramenní popruhy

Hrudní - ramenní popruhy pomáhají k pevnému držení sedící osoby za jízdy a minimalizují riziko úrazů při náhlých pohybech a nehodách.



7.4. Sedákový popruh

Sedákový popruh zajišťuje bezpečné držení a spolehlivě brání vyklouznutí ze sedačky. Je vhodný zvláště pro děti, které netolerují upevnění na horní části těla. Dejte pozor na to, aby popruh byl vždy správně přizpůsobený, aby bylo zajištěno pohodlí a stabilita.



Poznámka: popruh je správně umístěný, pokud spony na upevnění nohou směřují dolů.



7.5. Pánevní pás, s volitelným plastovým nebo kovovým zámkem

V některých případech může lékař nebo odborník ze zdravotních a bezpečnostních důvodů doporučit používat pánevní pás namísto 5 bodového popruhu, pro lepší splnění potřeb sedící osoby.



7.6. Chrániče popruhů

Chrániče popruhů snižují tlak a tření na kůži a nabízejí tak zvláště při delších jízdách zvýšené pohodlí. Díky ochraně před opotřebením a znečištěním prodlužují životnost popruhů.



8. Polštář pro přizpůsobení sedící polohy

V programu příslušenství kočárků Reha KANGOO jsou nabízeny různé polštáře, přispívající ke stabilizaci sedící polohy osoby. V následující kapitole je popsána montáž příslušných dílů.

8.1. Sedákový klín s / bez abdukčního klínu

Obě varianty sedákového klínu jsou dvoudílné a nabízejí maximální možnosti přizpůsobení pro ergonomickou sedící polohu. Výšku sezení je možno individuálně přizpůsobit pomocí vyjímatelného pěnového modulu.

Verze s abdukčním blokem podporuje optimální polohu boků a zajišťuje dodatečnou stabilitu při sezení.



8.2. Zádový klín 2 dílný

Náš dvoudílný zádový klín nabízí mnohostrannou podporu pro zdravé držení těla. Díky modulární konstrukci můžete sklon klínu přizpůsobit svým individuálním potřebám. K tomu nejdříve rozepněte zip na spodní straně a pěnový klín vyjměte z lákového potahu. Potom zapněte spodní a boční zipy. Integrované průchody pro popruhy se třemi různými výškovými polohami umožňují bezpečné zafixování na kočárku KANGOO.



8.3. Hrudní pelota

V párech dodávané hrudní peloty nabízejí rozměrově přizpůsobenou podporu v hrudní oblasti. Díky svým upevňovacím suchým zipům se dají snadno upevnit v různých polohách. Tato flexibilita vám umožňuje umístit peloty přesně tam, kde potřebujete dodatečnou podporu pro dosažení optimálního držení těla.



8.4 Pánevní pelota včetně vedení nohou [krátká / dlouhá]

Naše pánevní peloty s vedením nohou nabízejí cílenou stabilizaci pro pánevní oblast. Dodávají se v krátkém a dlouhém provedení. Díky suchému zipu je možno peloty jednoduše a bezpečně upevnit tak, aby bylo zajištěno optimální podepření.



8.5. Loketní opěra s pánevní pelotou

Loketní opěra s integrovanou pánevní pelotou nabízí komfortní a podporující řešení pro horní část těla. Loketní opěra je koncipovaná tak, aby paže byly pohodlně podepřeny a současně byla stabilizována pánevní oblast. Přiložený suchý zip fixuje polštář na sedadle.

i **Poznámka:** přebytečný suchý zip je možno odstříhnout nůžkami.



8.6. Hlavový klín s / bez bočního vedení

Náš hlavový klín nabízí příjemnou podporu pro oblast krku a hlavy a dodává se ve dvou provedeních: s a bez bočního vedení. Provedení s bočním vedením zajišťuje dodatečnou stabilitu a vyrovnaní hlavy. Díky nastavitelnému systému suchých zipů můžete výšku a polohu hlavového klínu individuálně přizpůsobit pro zajištění optimální podpory a pohodlí.



8.7. Kolenní válec

Náš kolenní válec nabízí cílenou podporu a odlehčení kolenních kloubů při sezení. Díky svému ergonomickému provedení se optimálně přizpůsobí přirozenému tvaru kolen. Měkké čalounění zajišťuje pohodlí, zatímco odolný potah přispívá k dlouhé životnosti.



8.8. Lýtková opěra CLASSIC/VARIO

Naše lýtkové čalounění nabízí cílenou podporu a odlehčení lýtek při sezení. Měkký materiál zajišťuje příjemný komfort a přispívá k redukci otlaků a zlepšení prokrvení.



9. Volitelné připojení za jízdní kolo

S volitelnou možností použití kočárku Reha KANGOO jako přívěsu za jízdní kolo otevíráme rodinám možnost společně - téměř bez omezení - užívat přírodu.

Vždy při tom dodržujte bezpečnostní pokyny! Před první jízdou se s přívěsem seznámte bez dítěte.

Při jízdě doporučujeme používat sluneční střešku s uzavřenou moskytiérou. Tak sedící dítě chráníte před zvířenými kaménky a případným spolknutím hmyzu.

9.1. Sada osvětlení

Sada osvětlení je tvořena dvěma odrazkami a jedním elektrickým zadním světlem. [Baterie nejsou součástí dodávky.] Boky skořepiny sedačky očistěte od nečistot a mastnoty a nalepte odrazky. Zadní světlo upevněte dobře viditelně na rám sedačky.

9.2. Vlajka pro jízdu za jízdním kolem

Vlajka slouží k bezpečnosti sedícího dítěte. Zajišťuje viditelnost na nepřehledných místech a upozorňuje ostatní účastníky provozu.

9.3. Spojka pro jízdní kolo

Dodanou spojku namontujte podle montážního návodu firmy Weber.

i **Poznámka:** vhodnost svého jízdního kola k tažení kočárku KANGOO zjistíte u výrobce svého jízdního kola.

9.4. Oj pro připojení k jízdnímu kolu

Před každou jízdou prosím zkontrolujte funkčnost kočárku KANGOO. Zkontrolujte také opotřebení a správnou montáž všech dílů. Dodržujte také bezpečnostní pokyny, uvedené v kapitole 3.

Pro použití ve funkci přívěsu za jízdní kolo je nejdříve naléhavě nutno snížit polohu sedícího dítěte. K tomu uvolněte upnutí tlumiče a skořepinu sedačky spusťte dolů. Upnutí tlumiče zajistěte asi 10 cm nad upevněním tyče tlumiče.

Funkce madla se přitom podle obrázku změní na ochranný oblouk.

Pro montáž oje na kočárek odmontujte přední kolo. Osu oje zasuňte podle obrázku do vidlice a provizorně upevněte rychloupínací pákou. Pak na okraj rámu nasaďte černý upínací díl a ruční šroub pevně zašroubujte do upínací příruby. Zkontrolujte, zda jsou všechny díly pevně zajištěny.

Pro varianty CLASSIC a VARIO jsou k dispozici různé upínací díly. Různé verze jsou konstrukčně podmíněné a obě nabízejí maximální bezpečnost.

i **Poznámka:** pro snadnější montáž nabízíme pomocnou podpěru.

Druhý konec oje zasuňte podle montážního návodu firmy Weber do spojky Weber, předem namontované na jízdním kole. Přejeme vám dobrou a bezpečnou jízdu!



10. Upínací body

Před každou jízdou prosím zkontrolujte funkčnost kočárku KANGOO. Zkontrolujte také opotřebení a správnou montáž všech dílů. Dodržujte bezpečnostní pokyny, uvedené v kapitole 3.

Dodržujte také bezpečnostní pokyny technika, provádějícího přestavbu.

Sedákový klín je důležitou součástí systému upínacích bodů. Vzpřímená poloha je důležitá pro bezpečnost.

Z kočárku KANGOO sejměte skořepinu sedačky. Zádržný popruh namontujte tak, aby navzájem spojoval spodní rám a rám sedačky. Na rámu sedačky ved'te popruh pod kloubovou spojkou. Na spodním rámu ho zasuňte do zámku popruhu. Ozve se výrazné CVAKNUTÍ. Popruh musí pevně sedět i po spuštění tlumiče.


Upevňovací body na kočárku KANGOO jsou vyznačeny zobrazením karabin.

Karabiny svého systému upínacích bodů upevněte podle obrázku do vyznačených bodů na přední straně spodního rámu. Popruhy musejí být pevně napnuté.

Na zadní části spodního rámu, mezi kolem a tlumičem se nacházejí další připojovací body. I zde musejí být popruhy pevně napnuté.

Dítě sedící v sedačce KANGOO je ve vozidle zajištěno 3 bodovým pásem. Tento pás protáhněte vyfrézovanými štěrbinami skořepiny sedačky a pečlivě sepněte zámek pásu.

Další zajištění není předepsáno. Doporučujeme však náš 5 bodový bezpečnostní pás [široký pás se zámkem] jako dodatečné bezpečnostní opatření.

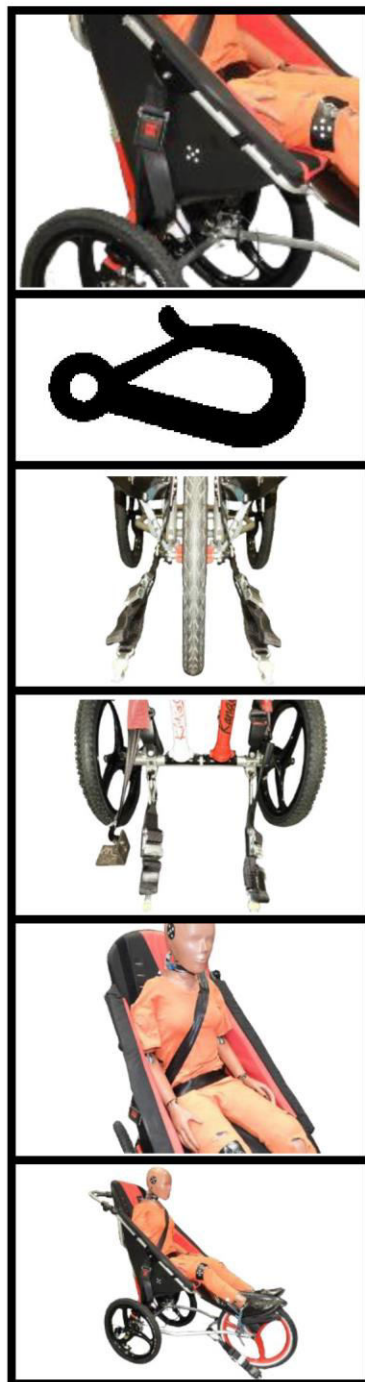

11. Údržba a ošetřování

11.1. Údržba

Funkce vašeho kočárku Reha je nutno kontrolovat před každým použitím. Uživatel musí v uvedených intervalech provádět následující kontroly:

Funkční kontrola brzdy	Před každou jízdou
Kontrola šroubových spojů	Jednou týdně
Tlak vzduchu [podle údaje na pneumatice] doporučený 3,5 baru	Jednou týdně
Vizuální kontrola opotřebovávajících se dílů [kola, ložiska]	Jednou měsíčně
Znečištění ložisek	Jednou měsíčně

V případě závad se prosím obraťte na svého odborného prodejce za účelem jejich odstranění. Dále doporučujeme provedení pravidelné kontroly u vašeho odborného prodejce každých 12 měsíců.

11.2. Tipy pro ošetřování

Díly rámu a plastové díly vyčistěte běžným čisticím prostředkem. Nepoužívejte agresivní chemikálie, které mohou napadat použité materiály.

Věnujte pozornost zvláště usazeninám, které mohou ovlivnit bezpečnost.

Díly čalounění je možno čistit teplou vodou. U oblečení postupujte podle odpovídajících označení pro praní.

Hlavně kola s ozubenými věnci je nutno čistit pravidelně, zvláště po intenzivním používání. Silné znečištění podstatně zvyšuje opotřebení.

Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách a podle potřeby pneumatiky dohustěte. Kontrolujte opotřebení a poškození pneumatik a podle potřeby je nechte vyměnit.

Kontrolujte funkčnost brzd. Zajistěte, aby fungovaly spolehlivě a nevykazovaly žádné známky opotřebení. Při problémech je nutno brzdy okamžitě opravit nebo vyměnit.

Uvolněné spoje mohou ovlivnit stabilitu a bezpečnost kočárku KANGOO. Pravidelně kontrolujte pevné utažení všech šroubů a matic.

Kočárek skladujte na suchém místě a chraňte ho před přímým slunečním zářením, deštěm a sněhem. Extrémní teploty a vlhkost může ovlivňovat materiály a funkčnost kočárku.


Kočárek nechte v pravidelných intervalech kontrolovat odborníkem. Tím zajistíte bezvadnou funkci všech dílů a včasné zjištění a odstranění případných závad.

12. Technický popis

Podvozek:	Vysoce kvalitní hliník s práškovou vrstvou
Skořepina sedačky	ABS plast, v rozměru 1 a 2 s karbonovým efektem
Čalounění:	Pěnový materiál odolný proti prosezení, vrchní materiál Cordura
Tlumiče:	Hliníkové pouzdro a PU-izolace, upínací blok z eloxovaného hliníku, kočárek KANGOO rozměr 1 + 2 s jedním tlumičem KANGOO rozměr 3 se dvěma tlumiči
Systém popruhů:	Podle výběru, nutný
Kola:	Slitina AlMg, s práškovou vrstvou s vysoce kvalitními průmyslovými kuličkovými ložisky, vzduchové pneumatiky [doporučený tlak 3,5 baru] nebo pneumatiky odolné proti poškození [polyuretan]
Brzdový systém:	Bubnová brzda s integrovanou parkovací brzdou
Kryty kol:	ABS plast s karbonovým efektem
Úložná taška:	Materiál Cordura

13. Technická data

Technická data			
Data podvozku	Rozměr 1	Rozměr 2	Rozměr 3
Celková šířka kočárku	70,5 cm	70,5 cm	70,5 cm
Celková šířka provedení pro jízdu za jízdním kolem	86 cm	86 cm	86 cm
Rozměry obalu [d x š x v] podvozek	88x49x42 cm	88x57x42 cm	88x58x42 cm
Rozměry ve smontovaném stavu [d x š x v]	119x70,5x111 cm	130x70,5x111 cm	130x70,5x120 cm
Rozsah nastavení madla	90 cm -111 cm	90 cm -111 cm	100 cm-120 cm
Průměr kol	20"	20"	20"
Max. nosnost	40 kg	60 kg	80 kg
Vlastní hmotnost [bez příslušenství]	14,5 kg	15 kg	16,5 kg
Hloubka sedačky	29 cm	37 cm	45 cm
Šířka sedačky	27 cm	35 cm	40 cm
Výška opěradla	58 cm	65 cm	80 cm
Prodloužení opěradla	-	75 cm	90 cm
Zvětšení hloubky sedačky	-	<47	>55 cm

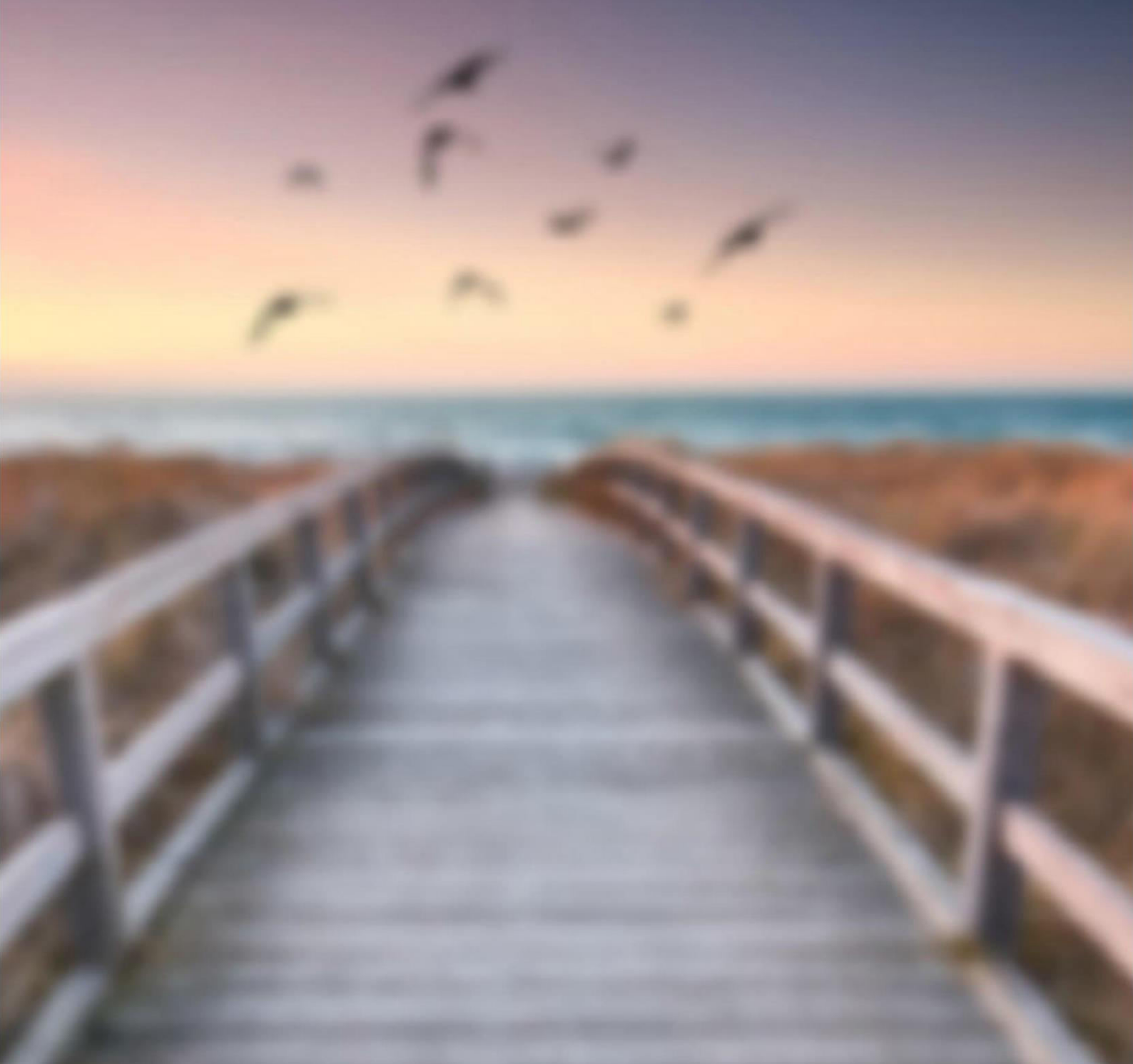

Holly Garden s.r.o.

Winklerova 1668/2
10700 Praha 10
Česká republika

IČ: 09373331
DIČ: CZ09373331

Telefon: 773 033 595
Web: www.rehabiflexx.com

HMN: 18.99.01.2044