



Uživatelský manuál EIO Kočárek





VAROVÁNÍ: DEJTE POZOR NA ZÁVAŽNÉ PORANĚNÍ PÁDEM NEBO VYKLOUZNUTÍM. NIKDY NENECHÁVEJTE DĚTI SAMOTNÉ. VŽDY MĚJTE DĚTI V DOHLEDNÉ VZDÁLENOSTI. DŮLEŽITÉ: UCHOVÁVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ REFERENCE. BEZPEČNOST DĚTÍ JE VAŠE ODPOVĚDNOST. VŽDY POUŽÍVEJTE FIXACI SEDAČKY. VŽDY KDYŽ ZASTAVÍTE MUSÍTE POUŽÍT PARKOVACÍ BRZDY. TENTO KOČÁREK JE VHODNÝ PRO JEDNO DÍTĚ.

DŮLEŽITÉ

- PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO POKYNY A UCHOVÁVEJTE JEJICH PRO BUDOUCÍ REFERENCE.
- BEZPEČNOST DĚTÍ MŮŽE BÝT OHROŽENÁ POKUD NEDODRŽÍTE TYTO POKYNY.
- PŘI PARKOVÁNÍ KOČÁRKU POUŽIJTE BRZDU

VŠEOBECNÉ INFORMACE A BEZPEČNOST

- Pečlivě dodržujte všechny pokyny. Nesprávné použití způsobí poškození kočárku.
- Tento produkt byl navržen tak, aby pojal maximální hmotnost 40 kg.
- Děti by měly být vždy zafixovány popruhy a nikdy by neměly být ponechány bez dozoru.
- DŮLEŽITÉ - Pro bezpečnost vašeho dítěte je důležité, aby byl postroj správně namontován a nastaven. Pokud nebude správně nastaven, v souladu s pokyny, bude stabilita kočárku narušena.
- Postroj a bezpečnostní pás nenahrazují řádný dozor dospělých.
- Během nastavování by se dítě nemělo pohybovat.
- DŮLEŽITÉ - NEBEZPEČÍ: Je důležité věnovat pozornost tomu, aby se děti při skládání nebo rozkládání držely mimo dosah kočárku. Během těchto operací je možnost velkého úrazu sevrěním.
- V tomto kočárku ani na něm nepřenášejte další děti, zboží ani příslušenství, s výjimkou případů povolených v této příručce. Mohou způsobit, že se kočárek stane nestabilním. Tato manipulace by mohla vést k rozbití kočárku.
- Přetížení, nesprávné skládání a použití příslušenství, např. dětské sedačky, háčky na tašky, pokrývky deště, kočárky apod., jiné než ty, které doporučil dodavatel, mohou tento kočár poškodit nebo rozbit.
- Na škody způsobené použitím příslušenství nedodaného dodavatelem se nevztahují podmínky naší záruky.
- Nikdy nenechávejte dítě v kočárku při stoupání nebo klesání po schodech nebo eskalátorech nebo při cestování v jiných dopravních prostředcích.
- Kočárek by se měl vždy snadno otevírat a skládat. Pokud to nejde, nepoužívejte sílu. Možná bude nutné tyto pokyny znovu přečíst.
- Opatrně vyjíždějte obrubníky a drsnou zem. Opakovaný náraz způsobí poškození kočárku.
- Nikdy nedovolte dětem stát na opěrce nohou.
- Nenechávejte kočárek vystavený teplu, tj. radiátorem nebo na přímém slunci.
- Nepokládejte předměty na horní část boudičky, protože by se mohla poškodit.

ČÁSTI



ZADNÍ NÁPRAVA



OPĚRKA NA NOHY



PŘEDNÍ KOLA



ZADNÍ KOLA



BOUDIČKA



LATERÁLNÍ
PODPORA



SEDAČKA




RÁM A NÁK-
UPNÍ KOŠÍK



POZNÁMKA: TATO ČÁST JE OBALOVÝ MATERIÁL

1. RÁM

Otevřete rám ve svislé poloze.
Když je zapnutý primární a sekundární zámek, uslyšíte zvukové KLIKNUTÍ.
POZNÁMKA: Tuhé vložky z nákupních kapes mohou být vyjmuty.

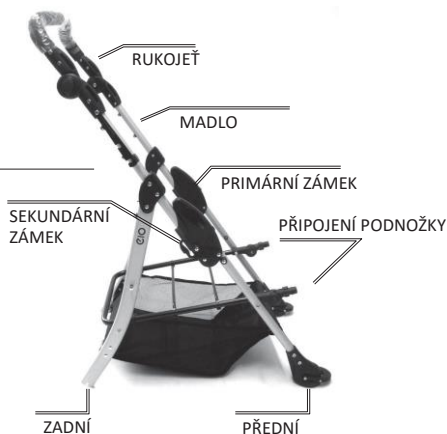

2. ZADNÍ NÁPRAVA

Zasuňte nohy zadního rámu do zadní nápravy.
Je-li zapnutý zámek, uslyšíte zvukové KLIKNUTÍ.



3. ZADNÍ KOLA

Zatlačte zadní kolo na zadní nápravě.
Je-li zapnutý zámek, uslyšíte zvukové KLIKNUTÍ.



4. PŘEDNÍ KOLA

Zatlačte na přední kolo nahoru do nohy předního rámu.
Promazat mírně v případě potřeby.
Je-li zapnutý zámek, uslyšíte zvukové KLIKNUTÍ.




5. PODNOŽKA

Nožní opěrku orientujte tak, aby směřovala nahoru.
Současně zatlačte trubice pro opěrku pro nohy a pravou nohu současně do rámu.
Je-li zapnutý zámek, uslyšíte zvukové KLIKNUTÍ.



6. SEDAČKA

Dvojité tlačítko na trubce držadla (pravá a levá strana).
Když je tlačítko stisknuto, uslyšíte zvukový SNAP.

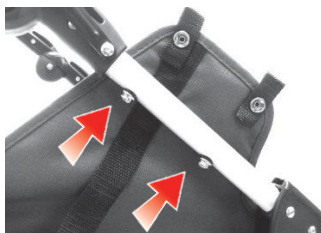

A. SEDAČKA

Mačkácí knoflíky podporující popruhy ke každé zadní noze.
Když je tlačítko stisknuto, uslyšíte zvukový SNAP.



B. POD RÁMEM SEDADLA X2


PŘEDNÍ POPRUH (nad šroubem,
pod nastavením nohou)

ZADNÍ POPRUH



C. DŮLEŽITÉ: POD SEDADLOVÝMI POPRUHY „D“ KROUŽKY

Provléknete spodní část a potom dolů.

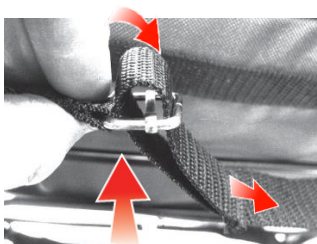

D. PODSEDADLOVÉ „D“ KROUŽKY

Volná část popruhu pod sedadlem by měla být umístěna
mezi popruhem a dnem sedadla.
NEUTAHOJTE příliš silně.



E. PODNOŽKOVÉ ZÁPADKY X2

Zapíná se knoflíková tkanina.
Když je tlačítko stisknuto, uslyšíte zvukový SNAP.



F. SUCHÝ ZIP NA OPĚRCE X2

Omotejte suchým zipem kolem rámu pro nohy a upevněte jej.
Opakujte na obou stranách.




G. POSTRANNÍ SUCHÝ ZIP

Sklote přes primární klouby a suchý zip dolů na obou stranách.




7. BOUDIČKA

- (A) Zasuňte klip vrchlíku dolů do konektoru rámu. Netlačte.
Ujistěte se, že klip neobsahuje žádné překážky.
Je-li zapnutý zámek, uslyšíte zvukové KLIKNUTÍ.
- (B) Chcete-li odstranit vrchlík, stiskněte sponu dolů a vysuňte ho.

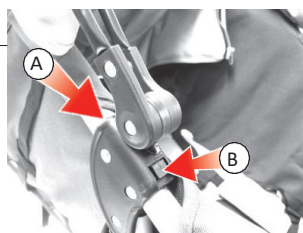


BOUDIČKA ZAPÍNÁNÍ

Připevněte stabilizační západky a zapněte zip.
Měly by být umístěny těsně pod držadlem tlačítko nastavení.
Opakujte vlevo.
POZNÁMKA: Zadní polovinu vrchlíku můžete odstranit
pomocí rozeptnutí středního švu.

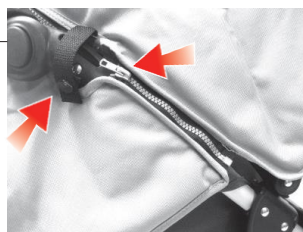

8. LATELÁTNÍ PODPORA X 4

Protáhněte oba pásy na suchý zip skrz otvory umístěné na okrajích sedacího a zadního povrchu.

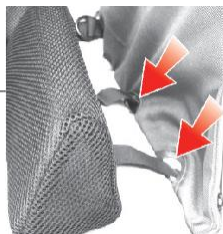

LATERÁLNÍ VELKÉ POPRUHY

Přitáhněte popruhy na suchý zip z vnějšku sedadla (nebo zadní) povrch. Poté obtočte rám a upevněte jej. Opakujte pro všechny popruhy.



9. BEZPEČOSTNÍ PÁS / FIXACE / NASTAVITELNÁ OPĚRKA NOHOU



VAROVÁNÍ: Zabraňte vážnému zranění pádem nebo vysunutím.

Vždy používejte rozkrokový pás v kombinaci s pasem a ramenními popruhy.

9.A VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ FIXACE

Odepněte klip hrudní podložky a posuňte popruhy dolů přes smyčky opěradla pro nastavení ramen.


Znovu připojte svorku hrudníku a zapněte.

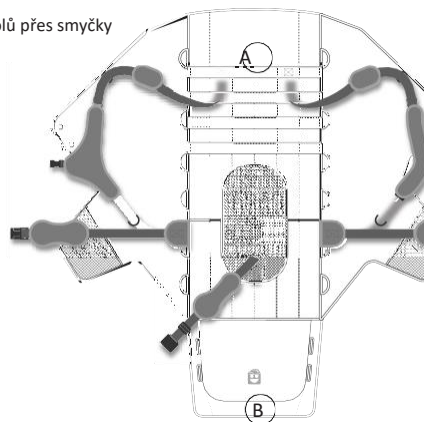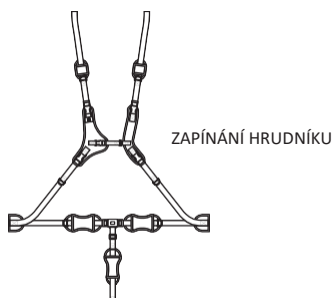

9.B VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ OPĚRKA

Přemístěte popruhy skrz otvory pro tkaninu na nohy a kolem rámu nohou. Upevněte klipy kolem zadní stranu a utáhněte ji.

Viz. další stránka.

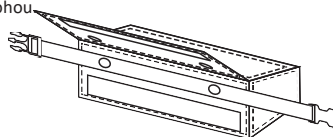

9.B VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ OPĚRKA (POKRAČ.)

Nožní blok nastaven.

POZNÁMKA: Opěrka lze nastavit

- prostrčte popruh kolem rámu výše nebo níže.



11. PARKOVACÍ BRZDA

Pomocí nohou ji zmáčknete směrem dolů a odjistíte směrem nahoru.



12. POPRUH NA POZICOVÁNÍ

NAHORU: Zatlačte na sklopnou sponu a zatáhněte za popruh.
DOLŮ: Stiskněte tlačítko sevření na sklopné sponě a stáhněte dolů.



13. POLOHOVÁNÍ NOŽNÍ OPĚRKY

Chcete-li nastavit úhel nohou, stiskněte tlačítko prop obě strany současně.

Pro aktivaci zámku se ozve zvukové KLIKNUTÍ.



14. NASTAVENÍ PŘEDNÍ NÁPRAVY

Chcete-li zapnout aretaci předních kol, odemkněte jazýček směrem nahoru abys se zapojili na obou stranách.
Po aktivaci zámku se ozve zvukové KLIKNUTÍ.

POZNÁMKA: Pro zajištění zámku musí přední kola směřovat dopředu.



15. SKLÁDÁNÍ KOČÁRKU

- (A) Plně sklopte kočárek
- (B) Sklopte boudoičku.
- (C) Umístěte rukojeť do svislé polohy
- (D) Oderetujte přední otočná kola
- (E) Umístěte podnožku do dolní polohy
- (F) Stoupněte si za kočárek, zvedněte primární zámky (na obou stranách) a sekundární zámek (na pravé straně).



SKLÁDÁNÍ

- (A) Primární zámky se uvolní
- (B) Zatlačte na rukojeť.



SKLÁDÁNÍ

- (A) Zapněte uzavírací sponu



ÚDRŽBA A OPRAVA

Tento kočárek vyžaduje pravidelnou údržbu uživatelem. Pravidelně kontrolujte těsnost a bezpečnost všech nýtů a připojovacích zařízení. Zkontrolujte všechny brzdy, kola a pneumatiky a v případě potřeby je vyměňte nebo opravte. Zkontrolujte správnou funkci všech bezpečnostních zařízení, zejména primární a sekundární zámky. Měly by se volně pohybovat. Nikdy nepoužívejte produkt, který je rozbitý.

- Doporučujeme dělat údržbu každých 12 měsíců.
- Pokud jsou kola vzrjící, promažte je mírně teflonovým nebo silikonovým nátěrem. **NEPOUŽÍVEJTE** produkty na bázi oleje nebo mastnoty, protože by to přitahovalo nečistoty, které znemožní pohyb.
- Používejte pouze náhradní díly od dodavatele.

ČIŠTĚNÍ

- Rám očistíte navlhčeným hadříkem a jemným čisticím prostředkem a důkladně osušte.
- Pokud byly části podvozku kočárku vystaveny slané vodě, doporučujeme je co nejdříve opláchnout čerstvou (tekoucí) vodou.
- Přístřešek možná jemně houbou navlhčil hadříkem a jemným čisticím prostředkem. Potah sedadla, polštář hlavy, boční polštářky a polštářky postroje mohou být umyty v pračce na 30 stupňů.
- Před opětovným použitím řádně osušte.
- Produkt neukládejte ani neskladujte za mokra a nikdy jej neukládejte ve vlhkém prostředí. Mohlo by dojít k tvorbě plísní.

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

Kontaktujte přímo svého prodejce.

- Autorizovaným dodavatelem kočárku EIO je společnost:
Petr Junek - REHABIFLEXX, IČ: 76163695
- Telefon: +420 773 033 101.
- E-mail: použijte formulář na www.rehabiflexx.com.
- Zdravotní Kočárek EIO je zdravotnický prostředek třída I nesterilní, pro zdravotně postižené osoby s poruchou mobility.

OZNÁMENÍ

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována, reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána ve vyhledávacím systému nebo přeložena do jiného jazyka nebo počítačového jazyka, v jakékoli formě nebo jakýmkoliv prostředky bez souhlasu dodavatele.

Na produkty od dodavatele používejte pouze příslušenství a díly dodané dodavatelem. Speciální díly nejsou zaměnitelné s produkty jiných výrobců. Opatřebované díly okamžitě vyměňte kvůli bezpečnosti.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Naleznete na webových stránkách: www.rehabiflexx.com.



MANUFACTURED BY:
BERGERON HEALTH CARE
15 SOUTH SECOND STREET
DOLGEVILLE, NY 13329

PRODUCT CODE:

PRODUCT DESCRIPTION:

COUNTRY OF ORIGIN:

**AUTHORISED
EUROPEAN
REPRESENTATIVE:**

GLOBAL CAREHAB
Holmstrupgaardvej 11
8220 Brabrand
Denmark

Tel: +45 24 65 55 50

Web: www.globalcarehab.com



Date:

Id:

Tento NÁVOD K OBSLUZE byl vydán 1. 6. 2019.

*Dodavatel si vyhrazuje právo změn z důvodů
technického vývoje produktu a příslušenství.*



© 2009 Bergeron By Design

Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.