

## Návod k použití



# KANGOO

Classic / Vario

Rehabilitace - kočárek  
Závěs na kolo  
Autosedačka



Přinášíme mobilitu – pro celou rodinu



## Návod k obsluze **KANGOO** Rehab Buggy

Obsah	Stránka
<b>1 Obecné informace</b>	
1.1 Předmluva	2
1.2 Zamýšlené použití	2
1.3 Oblasti použití	2
1.4 Prohlášení o shodě	2
1.5 Schválení	2
1.6 Záruční podmínky	3
<b>2 Bezpečnostní pokyny</b>	
2.1 Význam symboliky	3
2.2 Obecné bezpečnostní pokyny	3-4
<b>3 Dodávka a zjištění provozuschopnosti</b>	
3.1 Základní vybavení	4
3.2 Struktura	4-6
<b>4 Funkce</b>	
4.1 Rehabilitační kočárek	7
4.2 Autosedačka	8
4.3 Přívěs na jízdní kolo	8
<b>5 Příslušenství</b>	
5.1 Opěrka nohou / Zkrácení a prodloužení	9
5.2 Řiditelné přední kolo	10
5.3 Sluneční stříška včetně moskytiéry / pláštěnky proti dešti	10
5.4 Pásové systémy	11-12
5.5 Polštářek pro stabilizaci polohy sezení	13-14
5.6 Úložný box / úložná tkanina	14
5.7 Možnost jízdního kola	15-16
5.8 Možnost lyžování	16
<b>6 Přeprava v zavazadlovém prostoru</b>	16
<b>7 Údržba</b>	16
<b>8 Tipy pro péči</b>	17
<b>9 Technický popis</b>	17
<b>10 Technické údaje</b>	18



## 1. Obecné informace

### 1.1 Předmluva

Gratulujeme vám k výběru našeho rehabilitačního kočárku KANGOO, vysoce kvalitního výrobku, který vás bude těšit po dlouhou dobu. Multifunkčnost kočárku KANGOO vám poskytne kočárek, přívěš za kolo a autosedačku v jednom. Tento návod k obsluze vás má naučit, jak spotřebič správně používat.

Aby nedošlo k poškození v důsledku chyb v obsluze a aby bylo možné zařízení optimálně používat, přečtěte si pozorně následující pokyny nebo poznámky.

Pokud máte další dotazy, náš tým a váš specializovaný prodejce vám kdykoli rádi pomohou.

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny konstrukce popsané v tomto návodu k obsluze.

### 1.2 Zamýšlené použití

Poskytování rehabilitačních vozíků je nezbytné v případech, kdy je třeba přepravovat těžce postižené osoby, především děti a mladé lidi, kteří nemohou chodit, protože kvůli svému postižení nemohou samostatně řídit invalidní vozík. Vozík KANGOO také umožňuje dojet do míst, kam se nelze dostat se standardním invalidním vozíkem.

### 1.3 Oblast použití

Různé varianty vybavení a modulární konstrukce umožňují použití v případě neschopnosti chůze/poškození v důsledku

- Paralýza
- Ztráta končetin
- Defekt a/nebo deformace končetiny
- Kloubní kontraktury
- Poškození kloubů
- Ostatní nemoci

### 1.4 Prohlášení o shodě

Společnost BoGeTec GmbH jako výrobce prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že rehabilitační kočárek KANGOO splňuje požadavky směrnice 93/42 EHS.

Společnost BoGeTec GmbH prohlašuje shodu s CE pro zdravotnické prostředky třídy 1.

### 1.5 Schválení

Skořepiny sedaček velikosti 1 a 2 jsou schváleny jako autosedačky podle normy ECE R44/03.

Registrační číslo podle zákona o zdravotnických prostředcích je DE/CA40/00528/1, které vydal Zemský úřad Tübingen.

Dále je rehabilitační kočárek KANGOO zapsán v rejstříku pomůcek pod číslem **18.99.01.2044**.



## 1.6 Záruční podmínky

Záruční podmínky jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách (VOP) společnosti BoGeTec GmbH. Záruční lhůty na výrobní a materiálové vady jsou:

- 3 roky na hliníkové části rámu a kola
- 1 rok na potahy sedadel a kol
- 1 rok na tlumiče
- 90 dní na čalounické díly
- 90 dní na textilní díly (sluneční stříška, dešťová stříška, úložná tkanina...)
- 1 rok na všechny ostatní díly

## 2. Bezpečnostní pokyny

### 2.1 Význam symboliky

	<b>Poznámky a informace</b>
	<b>Upozornění a bezpečnostní pokyny</b>
	<b>Montáž a použití</b>

### 2.2 Obecné Bezpečnostní pokyny



**Nejprve si přečtete návod k obsluze!**

Před použitím se nejprve seznámte s obsluhou a funkcí výrobku a nacvičte si jeho používání.



Za bezpečnost svého dítěte jste zodpovědní vy. Bezpečnost vašeho dítěte může být ohrožena, pokud nebudete dodržovat pokyny. Přesto nelze pokrýt všechny stavy, které mohou nastat, a nepředvídatelné situace. Rozum, opatrnost a obezřetnost jsou faktory, které tento výrobek nemůže přinést; předpokládají se u uživatelů zařízení. Uživatel rehabilitačního vozíku by měl porozumět všem pokynům. Každá osoba používající rehabilitační vozík by měla obdržet instrukce o jeho používání. Pokud jsou pokyny nesrozumitelné a je třeba podrobnějšího vysvětlení nebo pokud máte další otázky, obraťte se na náš tým nebo na svého specializovaného prodejce.




**KANGOO není vhodný pro děti mladší 6 měsíců!**

Děti vždy připoutejte bezpečnostním pásem a nikdy je nenechávejte bez dozoru.



**Dodržujte přípustné hmotnosti (viz také: technické údaje).**



 Zavěšená břemena na rukojeti, jako jsou tašky apod., mohou mít negativní vliv na stabilitu.

Tlak v pneumatikách by se měl pravidelně kontrolovat a měl by být přibližně 3 bary.

 Schody a rychlostní nerovnosti překonávejte pouze s podvozkem nakloněným na zadní kola (nahoru: tahem dozadu; dolů: spouštěním dopředu).

Rehabilitační kočárek je schválen pouze pro přepravu jednoho dítěte.

 Při jízdě na svazích a v náklonech dbejte zvýšené opatrnosti:

- Vypadávání dítěte
- Převrácení rehabilitačního vozíku
- Odvoz rehabilitačního vozíku


 Obal uchovávejte mimo dosah dětí. Při použití plastového obalu hrozí nebezpečí udušení.

Před vyjmutím dítěte z vozu nebo jeho uložení do vozu vždy zablokujte brzdy!

### **Bezpečnostní pokyny pro přívěsný vozík za kolo:**

#### **Dodržujte je před KAŽDOU jízdou!**

 Zkontrolujte, zda jsou všechny západky, zámky a šroubové spoje pevně utaženy.

 Doporučujeme, aby cyklista i cestující v autě KANGOO používali cyklistickou přilbu.

Cestující ve vozidle KANGOO musí být připoután 5bodovým bezpečnostním pásem.

 Připevněte bezpečnostní lanko k jízdnímu kolu.


Při použití jako přívěsný vozík za jízdní kolo nechte parkovací brzdu vždy otevřenou.

 Všimněte si, že jízdni vlastnosti se po namontování přívěsu za jízdni kolo výrazně změny: větší poloměr otáčení, větší rozchod kol, snížený brzdný účinek (zejména při jízdě z kopce) v důsledku vyšší celkové hmotnosti.

 S přívěsem nepřejíždějte přes překážky (kameny, větve, výmoly atd.). Přívěs KANGOO je vybaven ochranou proti převrácení; ta může převrácení zabránit, ale ne jej zcela vyloučit.

Doporučujeme, abyste se s vozíkem seznámili jízdou BEZ spolujezdce, nejprve po rovině a později v terénu.

### **Bezpečnostní pokyny pro autosedačku**

 Schválení skořepin autosedaček velikosti 1 a 2 jako autosedaček platí pouze v kombinaci se systémem bezpečnostních pásů.

Ujistěte se, že jsou cestující i skořepina sedadla řádně připoutáni!

Podsedák velikosti 3 není schválen jako autosedačka. Takové použití je na vlastní nebezpečí!



### 3. Dodávka a příprava k použití

#### 3.1 Základní vybavení

- Složený silniční rám
- 1 přední kolo, 2 zadní kola
- Čalouněná skořepinová jednotka sedadla
- 5bodové bezpečnostní pásy
- Podávací tkanina
- Příslušenství podle vaší objednávky
- Návod k obsluze




#### 3.2 Struktura




Vyjměte silniční rám z obalu a odstraňte přepravní zámky a obal. Položte silniční rám naplocho na zem.

Zvedněte spodní část **A** přítláčné tyče nahoru. Vyklopte tlumič **B** nahoru a otevřete horní část tlačné tyče **C** o 180°.

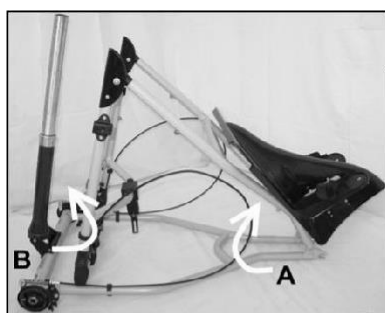


Vložte tlumič **B** do svorky **D** a pevně jej upněte pomocí páčky na svorce.

- ① **Poznámka:** Upínací sílu lze nastavit otáčením šroubu s vroubkováním vlevo od páčky.

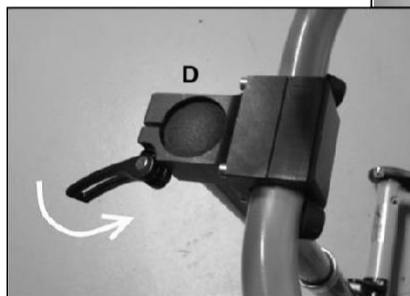

Vložte zadní kola s rychloupínacími nápravami do trubky zadní nápravy **E** až na doraz. Za tímto účelem odjistěte rychloupínací nápravu.


- ① **Poznámka:** Šroub je správně zajištěn, když je tlačítko opět pod napětím.

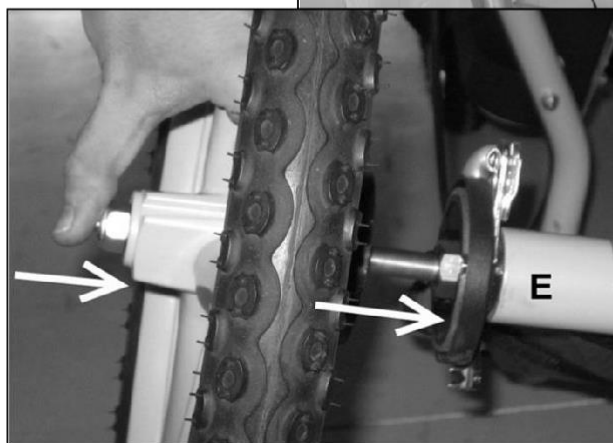



- 🔑 Vložte přední kolo do vidlice a proti značnému tlaku otočte páčkou rychloupínání ve směru zadních kol.

📌 **Poznámka:** Pro usnadnění montáže předního kola naklopte Kangoo dozadu na tlačnou tyč.

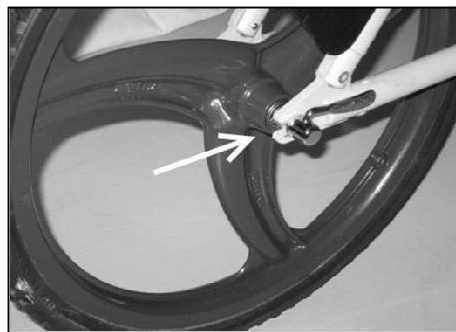

### Montáž skořepiny sedadla


- 🔑 Chcete-li připevnit sedlovku k silničnímu rámu, nejprve volně nasadte jednotku sedlovky **G** na tlačnou tyč.



- 🔑 Po uvolnění pásků suchého zipu na bočních polštářích se pojistné šrouby **H** zasnou do vybrání, která jsou k tomuto účelu připravena v sedáku a v tlačném rámu.

Ujistěte se, že sklopné držáky zajišťovacích šroubů leží na skořepině podle obrázku. V této svislé poloze jsou zajištěny. Lze je otevřít pouhým otočením do vodorovné polohy.

Následné nalepení bočních podložek zajistí pojistné šrouby v jejich poloze.

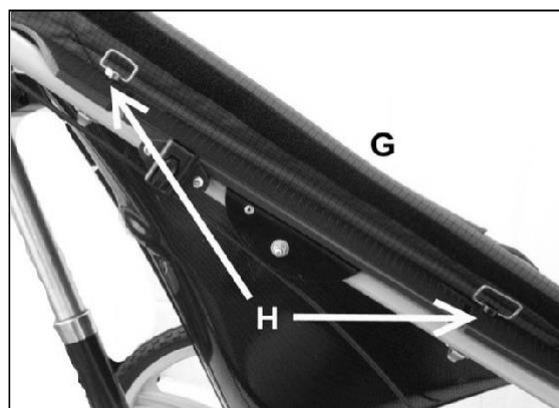



## 4. Funkce

### 4.1 Rehabilitační kočárek

- ① Ve standardní verzi lze Kangoo používat jako rehabilitační kočárek. Díky svým 20" kolům vám umožní přístup do lesa, na pole i na pláž, a tím i zážitek z pobytu v přírodě. Tlumič nárazů chrání cestující před nárazy a otřesy v nerovném terénu.

- ① **Sklon sedadla a tlumení nárazů**



Sklon sedadla lze nastavit v místě upnutí tlumiče uvolněním upínací páky. Tlumič se vlivem zatížení zanoří do vedení hřídele.

Upínání by proto mělo být od hřídelové nádoby vzdáleno minimálně 5 cm.

- ① **Bubnové brzdy včetně brzd**

Umožněte doprovázející osobě bezpečně a pohodlně brzdit. Zadní kola zůstávají odnímatelná díky systému rychloupínací nápravy.

Parkovací brzdou zapnete tak, že brzdovou páku (malou) zatáhnete rukojetí dozadu, až se červené tlačítko slyšitelně zapne.

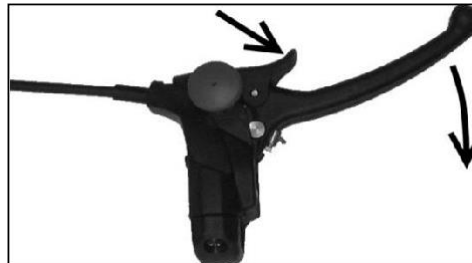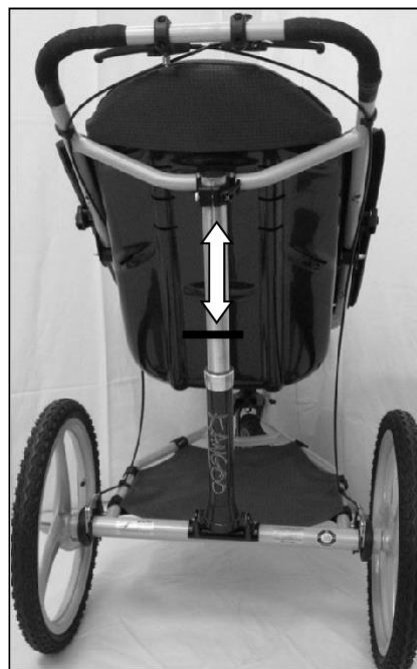

Chcete-li parkovací brzdou uvolnit, zatáhnete za rukojeť brzd a druhou rukou vytáhnete (odemkněte) červené tlačítko.







## 4.2 Autosedačka

Skořepiny sedaček velikosti 1 a 2 jsou schváleny jako dětské autosedačky v kombinaci se systémem bezpečnostních pásů KA-1833.

*Hmotnost cestujícího zde nesmí překročit 40 kg.*

### Upevnění skořepiny sedadla ve vozidle



Jednotku sedadla lze umístit do vozidla podle obrázku.

Tříbodový pás vozidla se provlékne drážkami na skořepině sedadla a zajistí se v zámku pásu.

- ① **Poznámka:** Podsedák velikosti 3 není schválen jako autosedačka. Takové použití je na vlastní nebezpečí. Při použití jako autosedačka musí být cestující připoután bezpečnostním pásem podle normy ECE44/03.



## 4.3 Přívěs na jízdní kolo

Kangoo lze použít také jako přívěsný vozík za jízdní kolo. Podrobný popis použití a montáže naleznete v kapitole Příslušenství: Volitelná výbava pro jízdní kola.





## 5. Příslušenství

Veškeré příslušenství se dodává v montážních sadách. Veškeré příslušenství, pokud již nebylo nainstalováno odborným prodejcem, musí namontovat vyškolený odborný personál.



Popruhy na příslušenství jsou obvykle velkoryse dimenzované, aby se přizpůsobily všem možnostem. Přebytečné konce řemínků příslušenství zkraťte až po jejich individuálním nastavení. Konec pásu lze zajistit proti roztřepení zatavením ustříženého okraje (např. pomocí zapalovače).

### 5.1 Opěrky nohou / Zkrácení a prodloužení



Namontujte opěrky nohou vlevo a vpravo od obložení předních kol. Za tímto účelem vložte šrouby z vnější strany skrz kovový držák opěrky nohou a otvory v obložení kola. Poté utáhněte matici zevnitř pomocí otevřeného klíče.

Pro nastavení polohy opěrek nohou je v obložení kol již několik otvorů.

Povolením přední křídlové matice na spodní straně opěrky nohou lze opěrku nohou vyklopit směrem ven.



#### Zkracování a prodloužování



Nejprve pevně přišroubujte desky ke kovovým držákům opěrek nohou podle jejich účelu (zkrácení nebo prodloužení). Vložte šrouby skrz podlouhlé otvory v deskách a otvory v obložení kol. Poté zevnitř pevně zašroubujte matici pomocí otevřeného klíče.






## 5.2 Řiditelné Přední kolo

- Po demontáži 20" předního kola jednoduše zasuňte držák říditelného předního kola do vidlice. Poté pevně upněte říditelné přední kolo pomocí rychloupínací páky.



## 5.3 Sluneční stříška s moskytiérou

- Nejprve vložte již namontovanou sluneční stříšku na rámy pomocí adaptérů na pravé a levé straně do otvorů na rámu vozovky. Nyní připevněte pásek na suchý zip vzadu kolem tlačné tyče, natáhněte sluneční stříšku dopředu a zavřete zámký na pravé a levé straně.

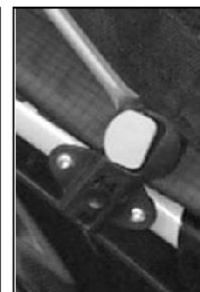

- Moskytiéra je připevněna k přední části sluneční stříšky pomocí zipu a napnuta kolem silničního rámu pomocí přiložených popruhů.



### Dešťový kryt

- Vložte dodané hliníkové rámy s adaptéry na pravé a levé straně do zdířek na silničním rámu. Nyní přetáhněte dešťový kryt přes rámy, utáhněte upevňovací pásy kolem rámu a připevněte jej.
- Poznámka:** Když je sluneční stříška nainstalována, lze přes ni jednoduše přetáhnout kryt proti dešti.





## 5.4 Pásové systémy

Rehabilitační kočárek KANGOO je vhodný pro adaptaci různých systémů postrojů.

Standardně se dodává 5bodový zádržný pás. Pásky se připevňují následujícím způsobem:

### 5bodový zádržný pás (standardní)

- Pětibodový pás se připevňuje pomocí otvorů pro pásky ve skořepině a čalounění sedadla. Nejprve uvolněte střední polstrování a vyměňte ramenní popruhy za odpovídající. Provedte se štěrbinami. Nyní vedte boční popruhy příslušnými drážkami v sedáku mezi sedákem a bočními polštáři. Chcete-li připevnit pás spony, položte skořepinu sedadla "na záda", uvolněte spodní pásek suchého zipu sedáku a vedte pás příslušnou štěrbinou v sedáku a ve skořepině. Nakonec připevněte přezky k volným koncům popruhů.
- ① **Poznámka:** Délka postrojového systému se nastavuje pomocí přezek na volných koncích postroje.



### Systém 5bodových bezpečnostních pásů v autě

- Nejprve uvolněte sedák a provlečte ramenní popruhy příslušnými otvory. Abyste mohli vést pánevní pás drážkami ve skořepině sedadla, nejprve pás rozvažte na seřizovači. Nyní se nejprve protáhne pravou boční drážkou skořepiny sedadla, pak vede za skořepinu sedadla do levé boční drážky, tam se protáhne a nakonec se navlékne zpět do seřizovače. Chcete-li připevnit pás spony, položte skořepinu sedadla "na záda", uvolněte spodní pásek suchého zipu sedáku a vedte pás příslušnou štěrbinou v sedáku a ve skořepině. Nakonec připevněte spony k volným koncům popruhů. Stisknutím červeného tlačítka se otevře systém bezpečnostních pásů.
- ① **Poznámka:** Délka systému postroje se nastavuje pomocí nastavovacích prvků na systému postroje a také pomocí přezek na volných koncích postroje.






## Hrudník, rameno, pásek, stuha

- ➊ Nejprve uvolněte sedák a provlečte ramenní popruhy příslušnými otvory.  
Nyní odepněte dva pánevní popruhy směřující dolů od spony připnuté k živůtku a protáhněte je zezadu pánevními rozparky na bocích.  
Nyní protáhněte ramínka zpět přezkami a připněte je k živůtku.  
Chcete-li živůtek upevnit, spojte volné konce ramenních popruhů za sedákem s uzávěry bederních popruhů.

- ➋ **Poznámka:** Tyto pokyny se týkají Počáteční zapínání živůtku. Další oblékání a svlékání se provádí pomocí zipu.  
Nastavení se provádí pomocí nastavovacích prvků připevněných k pásu.

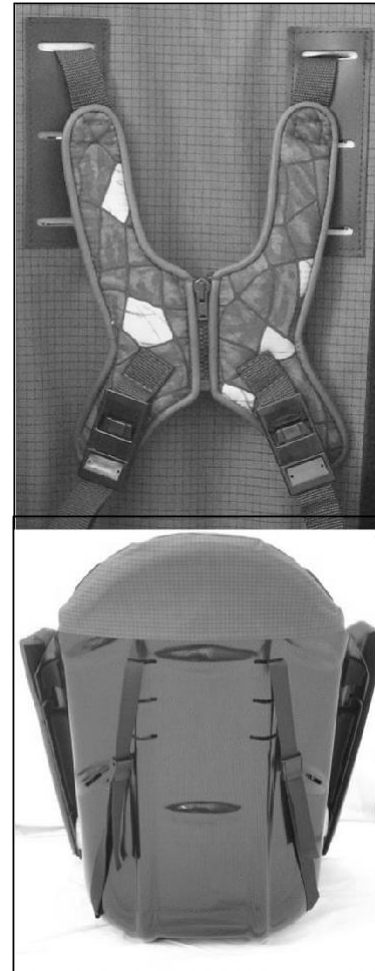

## Bezpečnostní pás

- ➊ Chcete-li bezpečnostní pás zapnout, nejprve jej umístěte do skořepiny sedadla.

- ➋ **Poznámka:** Spony na upevnění nohou musí směřovat dolů.

Nejprve rozvažte svorky na pánevních popruzích, které směřují šikmo dozadu.

Nyní protáhněte oba volné konce popruhů drážkami na boku skořepiny sedadla a znovu navlékněte svorky.

Dva konce popruhů na upevnění nohou

Nyní jej rovněž vedte dozadu bočními otvory na pravé a levé straně skořepiny sedadla a přetáhněte jej přes smyčku umístěnou na konci pásu na příslušný pás s klipem.

Konečná fixace bezpečnostního pásu se provádí uzavřením obou pásů pomocí spony na zadní straně skořepiny sedadla.

- ➋ **Poznámka:** Tyto pokyny se týkají První zapnutí bezpečnostního pásu. Další zapínání a vypínání se provádí pomocí spon na kalhotách. Nastavení se provádí pomocí nastavovacích prvků připevněných k pásu.





## 5.5 Polstrování pro stabilizaci polohy vsedě

V programu příslušenství rehabilitačního kočárku KANGOO jsou nabízeny různé polštáře, které pomáhají stabilizovat polohu sedícího. Následující kapitola popisuje montáž příslušných dílů.

### Hlavový klín s bočním vedením nebo bez něj



Všechny standardní čalounění skořepinové jednotky sedadla jsou obšity flísovými páskami. Pro přizpůsobení stačí přitisknout hlavový klín s háčkovou páskou na zadní straně k flísové pásce čalounění sedadla.



### Hrudní polštářky



Hrudní chrániče se při objednání dodávají v párech. Přizpůsobení se provádí stejným způsobem jako u hlavového klínu pomocí háčkových popruhů na zadní straně.



### Područka včetně opěrky pánve



Na područce je pásek na suchý zip, který slouží k upevnění. Pásku se suchým zipem podložte pod sedák a přilepte ji na stranu loketní opěrky.

**i** **Poznámka:** Přebytečný suchý zip lze odštípnout nůžkami.



### Sedací klín s abdukčním klínem nebo bez něj




Sedací klín je rovněž připevněn k sedací ploše skořepiny sedadla pomocí háčkových popruhů na spodní straně.





### Zadní klín 2dílný

- Zádový klín lze přeměnit na úzký zádový polštář, např. vyjmutím klínového polštáře.  
pro zvětšení hloubky sedadla a nastavení úhlu sedadla.  
Za tímto účelem nejprve otevřete zip na spodní straně a vytáhněte pěnový klín z látkového potahu. Poté zavřete spodní a boční zipy.  
Přizpůsobení skořepiny sedadla se opět provádí jednoduchým připevněním háčkových popruhů na zadní straně.

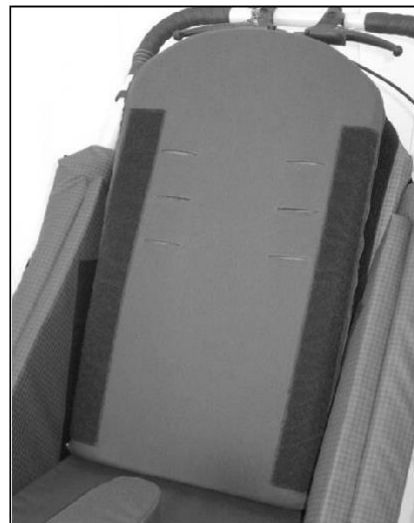

### 5.6 Úložný box / Úložná tkanina

- Úložná tkanina je připevněna k základnímu rámu silničního rámu pomocí pásek na suchý zip již při dodání.  
Úložný box se po vyjmutí úložné látky vloží do základního rámu ze strany.





## 5.7 Možnost jízdního kola

Díky možnosti použít rehabilitační kočárek KANGOO jako přívěsný vozík za jízdní kolo se rodině otevírá možnost

- téměř neomezeně užívat si přírody. Varianta pro jízdní kola zahrnuje oje, závěs pro jízdní kola, sadu osvětlení a bezpečnostní praporek.

### Oje jízdního kola

- Pro použití jako přívěs za jízdní kolo je nejprve nutné upravit polohu sedadla pro cestující snížit. Za tímto účelem uvolněte svorku na tlumiči a spusťte přítláčnou tyč tak, aby byla přibližně 10 cm nad uložením hřídele tlumiče.

Chcete-li na kočárek namontovat oje, sejměte přední kolo. Zasuňte osu oje do vidlice podle obrázku a nejprve ji upevněte pomocí rychloupínací páčky. Poté nasadte černý upínací díl **B** na obrys rámu **C** a pevně zašroubujte šroub rukojeti do upínací příruby.

- Poznámka:** Aby bylo možné pohodlně přesednout z předního kola na oje jízdního kola, je v nabídce příslušenství k dispozici pomocná podpěra.




### Závěs pro jízdní kolo

- Spojku pevně přišroubujte k rámu jízdního kola pomocí 3 šroubů s vnitřním šestihranem. Spojka by měla být namontována co nejbližší k zadní nápravě.

### Spojení oje jízdního kola

- Chcete-li zavěsit, vytáhněte zajišťovací kolík **D** a zasuňte kovový kolík oje do zásuvky tak daleko, jak to půjde. Pojistný kolík musí dokonale sedět v drážce kovového kolíku. Svědomitě to kontrolujte. Připevněte bezpečnostní lanko k jízdnímu kolu.

- Před každou jízdou zkontrolujte kompletní instalaci volitelného kola a dodržujte naše bezpečnostní pokyny na straně 4.**

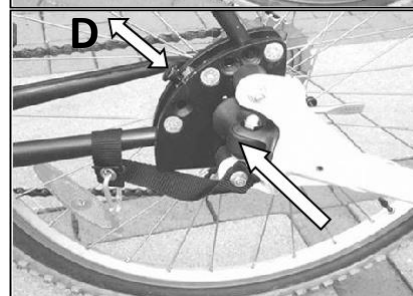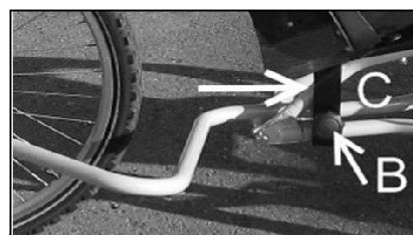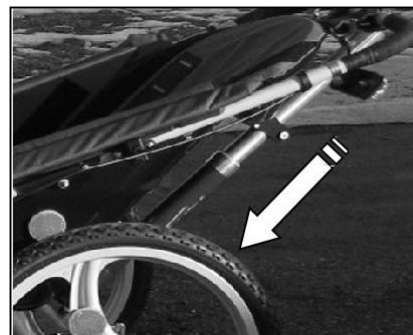





#### **Alternativa: spojka Weber E a B**

Připevněte závěs k rámu jízdního kola podle obrázku a přiloženého montážního návodu.

#### **Spojení oje**

Otevřenou oje zatlačte na kloub tak daleko, jak to jen půjde. Otáčejte rukojetí, dokud nezapadne pojistný kolík. Připevněte bezpečnostní lanko ke kolu.



#### **Sada osvětlení**

Připevněte reflektory na příslušná místa na rámu (baterie pro reflektory nejsou součástí dodávky). Očistěte boky skořepiny sedadla od nečistot a mastnoty a nalepte odrazky.



### **5.8 Možnost lyžování**

Pro milovníky zimních sportů je v nabídce příslušenství možnost běžeckého vybavení pro rehabilitační kočárek KANGOO. Kola se zasouvají do úchytů na Lyže vložené a zajištěné napínacím pásem



### **6. Přeprava v autě (zavazadlovém prostoru)**

Vozík Kangoo lze v několika jednoduchých krocích rozložit a složit a poté dosáhnout velikosti balení, které se vejde téměř do každého zavazadlového prostoru.

Za tímto účelem vyjměte kola a skořepinovou jednotku sedadla, kočárek složte a odložte.

(viz kapitola 3.2 Montáž) a v nejlepším případě použít sedačku jako autosedačku.



### **7. Údržba**

Použitelnost funkcí vašeho rehabilitačního vozíku je třeba před každým použitím zkontrolovat. Následující kontroly by měl uživatel provádět ve stanovených intervalech:

Kontrola funkce brzdy  
Kontrola šroubových spojů  
Tlak vzduchu (viz údaj na plášti pneumatiky)  
Vizuální kontrola opotřebitelných dílů (kola, ložiska)  
Znečištění ložisek

**Před každou jízdou!**  
**Týdenní**  
**Týdenní**  
**Měsíčně**  
**Měsíčně**

V případě jakýchkoli závad se obraťte na svého specializovaného prodejce, který je odstraní. Dále doporučujeme pravidelnou údržbu u vašeho specializovaného prodejce každých 12 měsíců.




## 8. Tipy pro péči

- ① Rám a plastové díly čistěte běžně dostupnými čisticími prostředky.
- ① Čalouněné části lze čistit teplou vodou. U oděvů se řiďte příslušnými pracími štítky.
- ① Všechny funkční prvky jsou opatřeny základním mazáním a měly by být čas od času promazány.

## 9. Technické Popis

<b>Rám ulice:</b>	Vysoce kvalitní hliník, práškově lakovaný
<b>Skořepina sedadla:</b>	ABS plast, ve velikostech 1 a 2 s karbonovým efektem
<b>Čalounění:</b>	Pěna odolná proti usazování, svrchní materiál Cordura
<b>Tlumič nárazů:</b>	Hliníkové pouzdro a PU tlumení, upínací blok z eloxovaného hliníku, Kangoo velikost 1 + 2 s jedním tlumičem. Kangoo velikosti 3 se dvěma tlumiči nárazů
<b>Pásový systém:</b>	Standardní 5bodový zádržný pás
<b>Kola:</b>	Slitina AlMg, práškově lakovaná, s vysoce kvalitními průmyslovými kuličkovými ložisky, pneumatikami s plnicím tlakem max. 3 bary nebo pneumatikami odolnými proti propíchnutí (polyuretan).
<b>Brzdový systém:</b>	Bubnová brzda s integrovanou parkovací brzdou
<b>Obložení kol:</b>	ABS plast s karbonovým efektem
<b>Podávací tkanina:</b>	Materiál Cordura

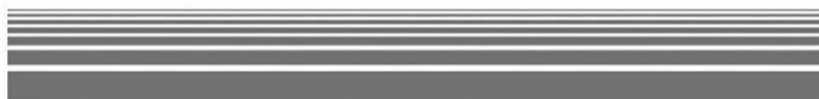

## 10. Technické údaje

Technické údaje			
Data silničního rámu	Velikost 1	Velikost 2	Velikost 3
Celková šířka kočárku	64 cm	64 cm	68 cm
Možnost celkové šířky jízdního kola	74 cm	74 cm	78 cm
Velikost balení (d x š x v) Silniční rám	87 x 49 x 42 cm	87 x 57 x 42 cm	94 x 68 x 42 cm
Rozměry (d x š x v)	125 x 64 x 111 cm	125 x 64 x 111 cm	143x68x 120 cm
Tlačítko rozsahu nastavení	90 cm - 111 cm	90 cm - 111 cm	100 cm - 120 cm
Průměr kola	20"	20"	20"
Max. Maximální zatížení	- 40 kg	- 40 kg	- 60 kg
Mrtvá hmotnost (bez příslušenství)	14,5 kg	14,5 kg	16,5 kg
Hloubka sedadla	27 cm	33 cm	43 cm
Šířka sedadla	27 cm	35 cm	39 cm
Výška opěradla	58 cm	65 cm	max. 80 cm



Tým BoGeTec vám nyní přeje mnoho radosti s vaším KANGOO a pro vaše KANGOO!  
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

BoGeTec GmbH Rehatechnik Haldenstraße 10  
D-88515 Langenenslingen-Ittenhausen  
Telefon: (+49) 7376-9622-69, Fax: (+49) 7376-9622-70  
e-mail: reha@bogetec.de, Internet: <http://reha.bogetec.de>

Distributor:  
Holly Garden s.r.o.  
Winklerova 1668/2  
10700 Praha 10  
Česká republika

[www.rehabiflexx.com](http://www.rehabiflexx.com)  
Telefon: 773 033 595  
Emai: využijte fromulář na webových stránkách