

Návod k použití

Před použitím připojení k jízdnímu kolu si pečlivě přečtěte návod k použití.

Připojení k jízdnímu kolu

„follow-me Multiroller“





Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

rádi bychom Vám poděkovali za projevenou důvěru a zakoupení našeho výrobku. Prosíme, abyste si před prvním uvedením výrobku do provozu pozorně přečetli tento návod k použití a řídili se jím. Vezměte prosím na vědomí, že pokyny a vyobrazení v tomto návodu se mohou v závislosti na výbavě lišit od Vašeho výrobku. Vyhrajujeme si právo na technické změny.

Důležitá informace!

Zajistěte, aby tento návod k použití zůstal u výrobku.

V případě dalších dotazů je Vám náš tým kdykoli k dispozici na tel. (06721) 906 0 nebo prostřednictvím videohovoru. Uvítáme také Vaše podněty ke zlepšení tohoto výrobku na e-mailu info@rehanorm.de.

Přejeme Vám mnoho radosti s připojením k jízdnímu kolu „follow-me Multiroller“,

Vaše

Andrea Staus a tým RehaNorm

Obsah

Obsah	3
1. Příprava	4
1.1 Dodání	4
1.2 Bezpečnostní opatření před použitím	4
1.3 Bezpečná likvidace	4
1.4 Umístění návodu k použití	4
2. Popis výrobku	5
2.1 Obecné informace	5
2.2 Oblasti použití, určené použití	5
2.3 Použití v rozporu s určením / výstražná upozornění	5
2.4 Jízdní vlastnosti	7
2.5 Výbava základního modelu	8
2.6 Přehled výrobku	8
3. Požadavky na tažné jízdní kolo	9
4. Montáž připojení k jízdnímu kolu	9
4.1 Důležité informace k používání rychloupínáků	9
4.2 Montáž adaptéru plné osy	11
4.3 Adaptér pro nábojové řazení	11
4.4 Montáž adaptéru průchozí osy	13
4.5 Montáž připojení k jízdnímu kolu	14
4.6 Připojení k variantě Jogger	15
5. Připojení a odpojení během cesty	16
6. Příslušenství (volitelné)	17
7. Čištění a údržba	18
7.1 Péče	18
7.2 Údržba	18
7.3 Náhradní díly	18
8. Technické údaje	18
9. Záruka	19
9.1 Doba záruky	19
9.2 Omezení záruky	19
9.3 Formulář pro uplatnění záruky	19

10. Identifikace	20
10.1 Vydání dokumentu	20
10.2 Název a adresa výrobce, dodávající odborný prodejce	20

1. Příprava

1.1 Dodání

Po obdržení zkontrolujte úplnost výrobku, jeho bezvadný stav a případné škody způsobené přepravou. Zboží zkontrolujte za přítomnosti přepravce. Pokud zjistíte škody způsobené přepravou, nechte za přítomnosti přepravce sepsat soupis (zjištění závad). Písemnou reklamaci zašlete příslušnému odbornému prodejci.

1.2 Bezpečnostní opatření před použitím

Správné používání výrobku vyžaduje přesné a pečlivé zaškolení uživatele, případně doprovázející osoby. Prosíme, abyste si před prvním uvedením výrobku do provozu pozorně přečetli tento návod k použití a řídili se jím. Části výrobku, které mohou přijít do styku s pokožkou, se mohou vlivem slunečního záření zahřát. Tato místa zakryjte nebo výrobek chraňte před přímým slunečním zářením.

1.3 Bezpečná likvidace

Za účelem zachování a ochrany životního prostředí, prevence znečištění a zlepšení opětovného využití surovin (recyklace) dodržujte pokyny k likvidaci uvedené v bodech 1.3.1 a 1.3.2.

1.3.1 Obal

Obal výrobku by měl být uschován pro případnou pozdější přepravu. Pokud budete výrobek zasílat k opravě nebo v rámci záruky, použijte pokud možno originální karton, aby byl výrobek optimálně zabalen. V opačném případě vyřídte obalové materiály podle druhu a předejte je k recyklaci.



Nenechávejte obalové materiály bez dozoru, protože mohou představovat zdroj nebezpečí.

1.3.2 Výrobek

Po skončení životního cyklu výrobku vyřídte použité suroviny podle druhu a předejte je k recyklaci.

1.4 Umístění návodu k použití

Návod k použití pečlivě uschovejte a zajistěte, aby při případném opětovném použití zůstal u výrobku. Při ztrátě lze aktuální verzi kdykoli stáhnout z www.rehanorm.de.

2. Popis výrobku

2.1 Obecné informace

Připojení k jízdnímu kolu „follow-me Multiroller“ je chytré propojení rodičovského kola s dětským vozíkem pro náš výrobek Multiroller, které spojuje radost z jízdy a bezpečnost. S připojením „follow-me Multiroller“ může celá Vaše rodina bezpečně cestovat na kole. Připojení umožňuje rychle reagovat na měnící se situace, a to zcela bez nářadí! Multiroller můžete kdykoli snadno odpojit od jízdního kola a po jednoduché montáži kola Jogger jej ihned znovu používat jako Jogger.

2.2 Oblasti použití, určené použití

Připojení k jízdnímu kolu „follow-me Multiroller“ je určeno pro použití na asfaltových silnicích, cyklostezkách a polních cestách s povrchem z jemného štěrku. Cyklisté starší 18 let smějí s připojením „follow-me Multiroller“ přepravovat dítě / mladistvého.



2.3 Použití v rozporu s určením / výstražná upozornění

Připojení k jízdnímu kolu není vhodné pro elektrokola. Používejte jej pouze s běžnými jízdními koly.

- Před každou jízdou zkontrolujte připojení „follow-me Multiroller“, zda nejsou uvolněné šrouby a zda nedošlo k prasknutí nebo deformaci.
- Zkontrolujte pevné usazení všech rychloupínáků, šroubových spojů a zásuvných spojů (sklopný čep).
- Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu a stav pneumatik tažného kola a Multirolleru.
- Vždy kontrolujte ráfky, zda nejsou poškozené nebo nebezpečně opotřeбенé ráfkovými brzdami.
- Provedte zkoušku brzd a dbejte na to, aby u všech ráfkových brzd brzdové špalíky zcela dosedaly na boky ráfku a brzdné plochy byly čisté a bez mastnoty.
- Brzdovou páku nesmí být možné přitáhnout až k řídítkům.
- Kombinace tažného jízdního kola a Multirolleru se považuje za jeden celek. Je proto nutné dodržovat předpisy platné pro jízdní kola, např. ohledně osvětlení (v případě potřeby vybavte Multiroller bateriovým osvětlením) a odrazek.
- Pravidelně kontrolujte funkci osvětlení na tažném kole i Multirolleru.
- Zkontrolujte také obě kola podle pokynů výrobce jízdního kola.
- V zájmu všech jezděte vždy obezřetně a vyhýbejte se rizikům.

- Proto výslovně doporučujeme jezdit pouze s vhodnou cyklistickou přilbou podle DIN EN 1078.
- Pro používání připojení „follow-me Multiroller“ ve veřejném silničním provozu musí být tažné jízdní kolo i Multiroller vybaveny v souladu s předpisy. Za technicky bezpečný stav a vybavení podle předpisů příslušné země odpovídáte sami. Nechte si poradit odborným prodejcem.
- S novým připojením „follow-me Multiroller“ se může jízda, řízení nebo brzdění lišit od toho, na co jste u svého jízdního kola zvyklí. To platí zejména tehdy, pokud připojený Multiroller patří mezi větší rehabilitační kočárky a přepravovaná osoba je starší, a tedy i těžší. Nejprve vyzkoušejte připojení společně s Multirollerem mimo veřejný provoz a bez přepravované osoby. Teprve až se budete cítit jistě, nacvičujte jízdu s osobou v Multirolleru, která má běžné reakční schopnosti a dokáže v nebezpečí reagovat.
- Nejdůležitější při jízdě se soupravou jsou spolehlivé brzdy. Dodatečná montáž účinnějších brzd může být vhodná. Před úpravami se poraďte s odborným prodejcem a přečtěte si návod k jízdnímu kolu. Vždy nejprve proveďte několik zkušebních zabrzdění mimo silniční provoz.
- K brzdění soupravy používejte pokud možno vždy obě brzdy. Tím se nejlépe zachová jízdní stabilita a minimalizuje se riziko zablokování brzd nebo smyku tažného kola. Pamatujte, že za mokra je brzdný účinek nižší.
- Před rychlejší jízdou v zatáčce snižte rychlost, protože i Multiroller se může převrátit.
- Nesmí být překročena maximální tažná hmotnost (viz bod 8).
- Za tmy a nepříznivého počasí noste reflexní oděv; při použití jízdního kola s vícepřevodníkem vpředu noste přiléhavé nohavice.
- Za škody způsobené nesprávným používáním připojení „follow-me Multiroller“ nepřebíráme odpovědnost.

2.4 Jízdní vlastnosti

Pokud je Multiroller pomocí připojení „follow-me Multiroller“ spojen s tažným jízdním kolem, mění se jízdní vlastnosti. Doporučujeme proto nejprve dostatečně nacvičit používání připojení mimo veřejný provoz a bez přepravované osoby v Multirolleru. Teprve až se jako jezdec tažného kola budete cítit jistě, začněte pomalu nacvičovat jízdu s přepravovanou osobou v Multirolleru, abyste získali jistotu i v této situaci.

Při jízdě je nutné dbát zejména na následující:

- Před jízdou ověřte funkčnost brzd zkušebním zabrzděním.
- Na mokrému, kluzkém a sypkém povrchu jezděte vždy opatrně a vyvarujte se trhavého šlapání.
- Při jízdě, zejména při odbočování, vždy počítejte s celkovou šířkou zadních kol připojeného Multirolleru. Ta se výrazně liší od šířky tažného jízdního kola.
- Před rychlejší jízdou v zatáčce snižte rychlost, protože i Multiroller se může převrátit.
- Nikdy nejezděte bez držení řídítek.
- Za tmy a zhoršené viditelnosti používejte osvětlení, aby Vás ostatní účastníci provozu lépe viděli.
- Pro vlastní bezpečnost doporučujeme řidiči tažného kola i přepravované osobě v Multirolleru používat cyklistickou přilbu.
- Vyvarujte se dlouhodobého používání ve slaném prostředí, protože podporuje poškození korozí.
- Při brzdění by měl řidič tažného kola vždy použít oba na sobě nezávislé brzdové systémy.

2.5 Výbava základního modelu

Rozsah dodávky:

Připojení k jízdnímu kolu „follow-me
Multiroller“


Pojistný kolík (1 pár)

Závěsný popruh (1 kus)



2.6 Přehled výrobku

Následující obrázek znázorňuje názvy nejdůležitějších součástí a pojmy, se kterými se setkáte v tomto návodu k použití.

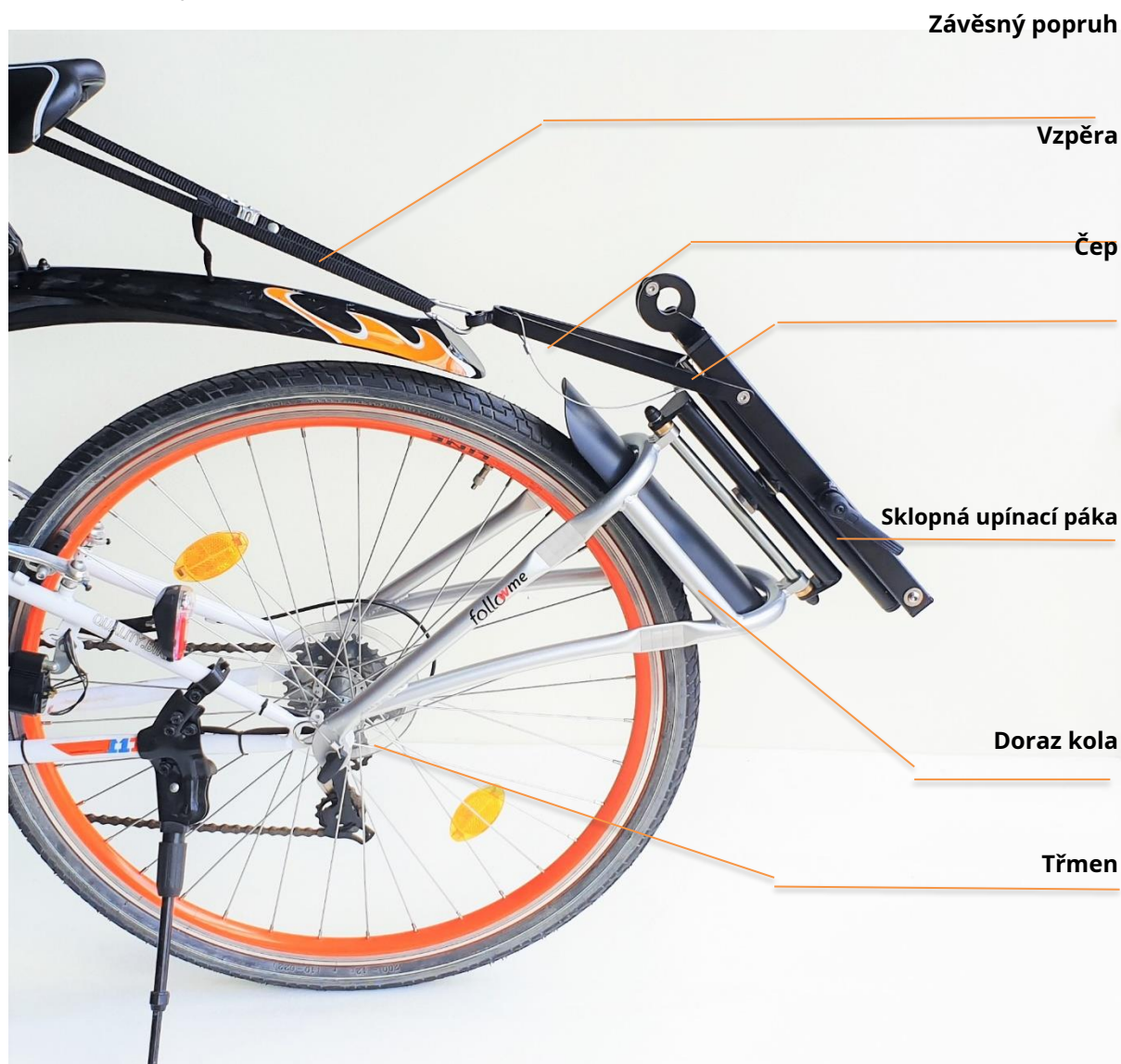

3. Požadavky na tažné jízdní kolo

Pro použití připojení „follow-me Multiroller“ jsou vhodná neodpružená i odpružená jízdní kola se zadní kyvnou vidlicí. Předpokladem je, že zadní stavba a ráfek zadního kola jsou dostatečně pevné, aby bezpečně přenášely typické boční síly, jaké vznikají také při použití jednostopých a běžných cyklistických přívěsů. Pokud při jízdě s připojením „follow-me Multiroller“ vzniká „houbovitý“ pocit z jízdy, může být Vaše jízdní kolo nevhodné. V případě pochybností platí, že výrobce jízdního kola určuje, zda je jeho použití s připojením „follow-me Multiroller“ povoleno. Před montáží se proto obraťte na servisní oddělení výrobce jízdního kola a ověřte, zda je montáž přípustná. V případě potřeby si nechte toto schválení vystavit písemně.


4. Montáž připojení k jízdnímu kolu

Způsob montáže připojení závisí na konstrukci tažného jízdního kola:

- Pokud má kolo dutou osu s rychloupínákem, přečtěte si oddíly 4.1 a 4.1.1.
- Pokud má kolo plnou osu s maticemi, přečtěte si oddíl 4.2.
- Pokud má kolo nábojové řazení se systémem Click-Box, přečtěte si oddíl 4.3.

4.1 Důležité informace k používání rychloupínáků

- Otevřete rychloupínák. Nyní by měl být čitelný nápis „Open“.
- Pro zavření pohněte pákou tak, aby byl z vnější strany čitelný nápis „Close“. Na začátku zavírání až přibližně do poloviny dráhy páky se musí páka pohybovat velmi lehce, tedy bez svíracího účinku.
- V druhé polovině dráhy se musí potřebná síla výrazně zvýšit. Ke konci jde páka zavřít jen obtížně nebo velmi obtížně. Použijte dlaň. V koncové poloze musí páka ležet rovnoběžně s kolem a nesmí odstávat do strany.
- Pokud lze upínací pákou otáčet dokola, není zajištěno bezpečné upevnění kola nebo třmenu. Znovu ji otevřete a otočením zvýšte předpětí.
- Zavření zopakujte a znovu zkontrolujte usazení. Pokud již upínací pákou nelze otáčet, rychloupínák je správně sevřen.

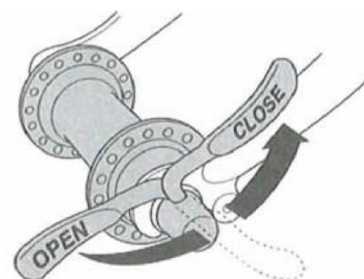




4.1.1 Výměna rychloupínáku na tažném jízdním kole

Nejprve otevřete rychloupínák (A) a zcela jej vyjměte.


Poté našroubujte speciální rychloupínák (B) a pevně jej upněte.

Dbejte na správnou montáž: po dotažení musí páka probíhat rovnoběžně se vzpěrou rámu (C) a musí jít pevně sklopit. Pokud páka naráží do rámu, není dostatečně dotažená a musí se znovu seřídit. Uvolněte páku, mírně dotáhněte matici na druhé straně a páku znovu upněte. Poté musí být kolo vystředěné, tj. vzdálenost mezi ráfkem a rámem musí být na obou stranách stejná.

V namontovaném stavu musí v upínací části zůstat nejméně 10-12 mm závitu volných (později se sem našroubuje křídlový šroub). Ověřte to tak, že křídlový šroub pevně zašroubujete. Pokud je po dosažení utahovacího momentu závit ještě viditelný, je nutné závitovou tyč odpovídajícím způsobem zkrátit. Pokud si nejste jisti, obraťte se na odborného prodejce (viz bod 10.2).

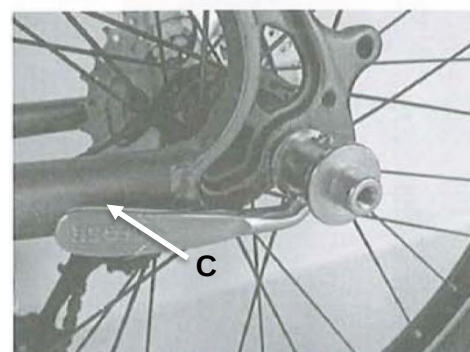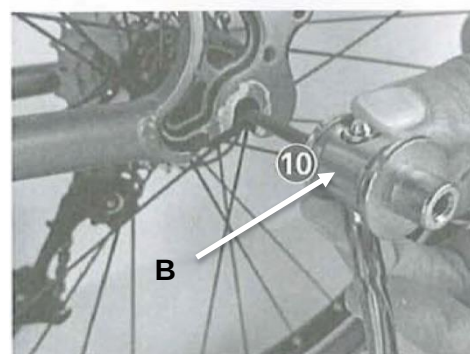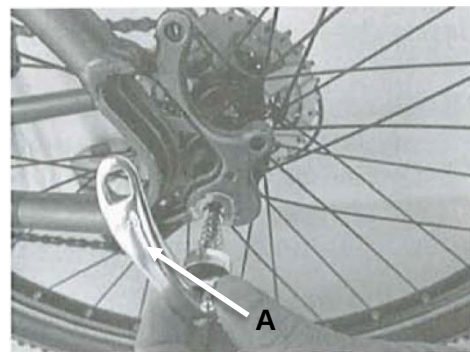

Pokud rychloupínací páka (A) není správně usazena, může se kolo uvolnit. Pravidelně kontrolujte pevné usazení rychloupínáků, nejlépe před každou jízdou!


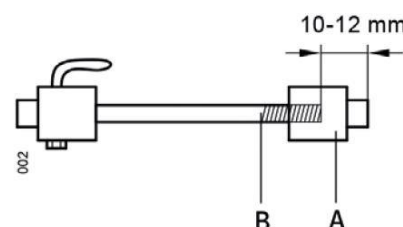


4.2 Montáž adaptéru plné osy

(u jízdních kol s maticemi kol)

Nejprve povolte a sejměte matice kol (A). Podložku ponechte na ose a našroubujte adaptér plné osy (B); spoj dobře utáhněte (dodržte údaj o utahovacím momentu výrobce jízdního kola).

Poté musí být kolo vystředěné. To znamená, že vzdálenost mezi ráfkem a rámem musí být na obou stranách stejná. Adaptéry plné osy zároveň přebírají funkci matic kol. Proto pravidelně kontrolujte jejich pevné usazení, nejlépe před každou jízdou.

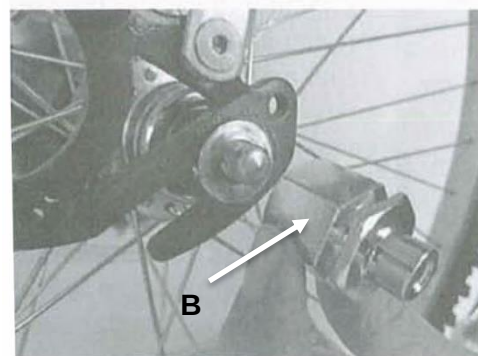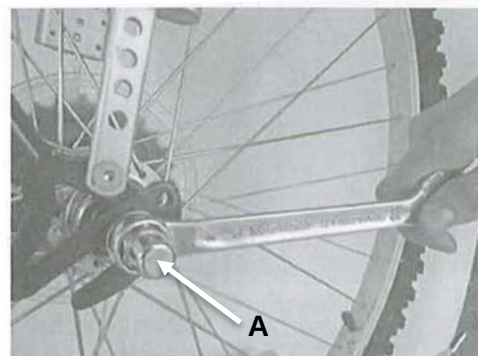

Pokud adaptéry plné osy nejsou správně usazený, může se kolo uvolnit. Pravidelně kontrolujte jejich pevné usazení, nejlépe před každou jízdou.



4.3 Adaptér pro nábojové řazení

(pro jízdní kola se systémem Click-Box nebo s řadicím lankem vedeným osou)

Pokud má Vaše kolo tento typ řazení, potřebujete adaptér plné osy.


Příklad nábojového řazení se systémem Click-Box (C).

Příklad nábojového řazení (D), u kterého je řadicí lanko vedeno osou.




4.3.1 Montáž adaptéru nábojového řazení

Nejprve demontujte Click-Box (A), případně odpovídající řadicí lanko z osy, a povolte matici kola (B).

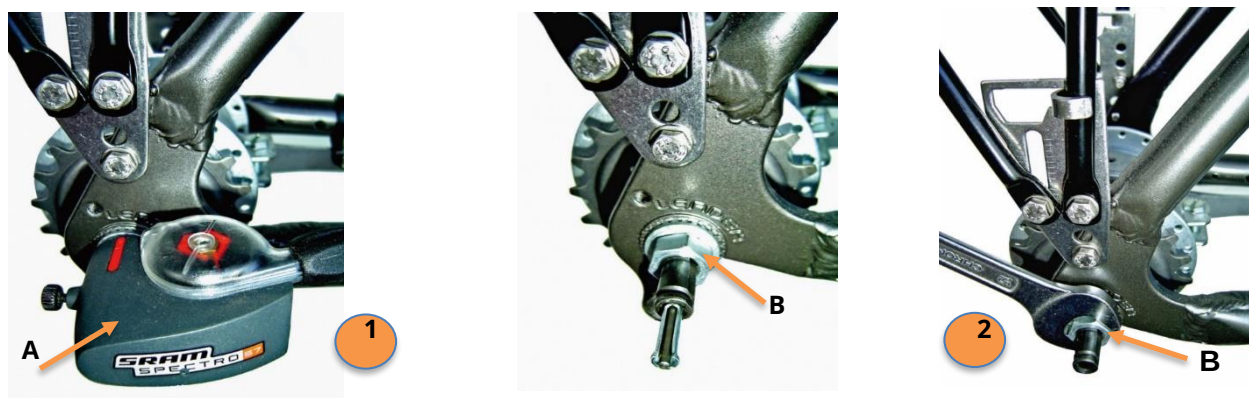


Poté držte U-trubkový třmen (C) mezi kolem a nosičem zavazadel.

Zasuňte spodní trubku (D) do U-trubky (C), nasuňte plochý profil s otvorem (E) na osu a matici kola znovu pevně utáhněte.

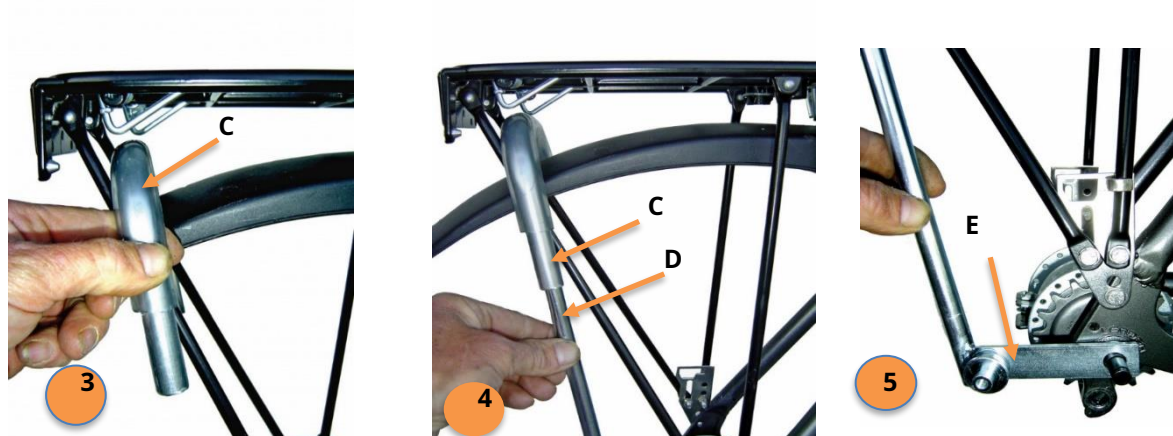

Nyní upevněte U-trubku (C) ke vzpěře nosiče zavazadel (F) pomocí stahovací pásky (G).

Stejné kroky 2 až 6 proveďte také na levé straně. Nakonec znovu namontujte Click-Box (A).

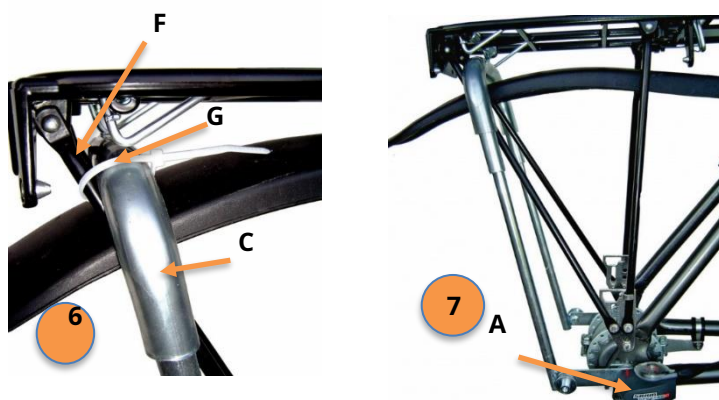


Pokud adaptéry nábojového řazení nejsou správně usazeny, může se kolo uvolnit. Pravidelně kontrolujte jejich pevné usazení, nejlépe před každou jízdou.

4.4 Montáž adaptéru průchozí osy

Nejprve povolte stávající průchozí osu (A) a vytáhněte ji.



Vezměte adaptér průchozí osy (B), povolte šroub (C) a zasuněte adaptér průchozí osy (B) do otvoru v rámu.

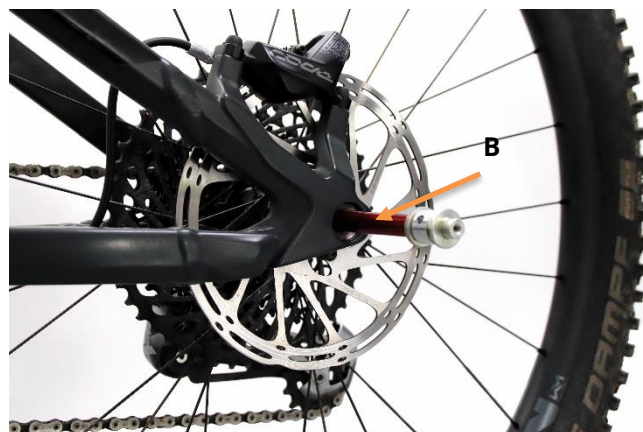


Nyní adaptér průchozí osy (B) pevně zašroubujte, např. pomocí imbusového klíče (D). Nakonec na druhé straně adaptéru průchozí osy (B) namontujte dříve povolený šroub (C) a také jej pevně utáhněte.



Pokud adaptér průchozí osy není správně usazen, může se kolo uvolnit. Pravidelně kontrolujte pevné usazení adaptéru průchozí osy, nejlépe před každou jízdou.



4.5 Montáž připojení k jízdnímu kolu

- Zavěste vzpěru (A) do čepu (B) a zajistěte ji pojistným kolíkem (C).
- Ujistěte se, že je pojistný kolík (D) zcela uzavřen. Pokud ne, otočte závlačku o 180° a pružný kroužek znovu uzavřete.
- Zavěste připojení „follow-me Multiroller“ na obou stranách do hlav matic, případně do adaptérů plné osy. Obě strany musí do hlavy matice zaklapnout.
- Zašroubujte křídlové šrouby (E) do hlavy matice a rukou je pevně dotáhněte. Spojka připojení „follow-me Multiroller“ přitom zůstává otočná.
- Vložte pojistnou závlačku (F): zasouvá se mezi spojku připojení „follow-me Multiroller“ a speciální rychloupínák. Rovný konec pojistné závlačky (F) zasuňte do otvoru na vnitřní straně spojky a protlačte jej tak daleko, až zcela zapadne do drážky speciálního rychloupínáku.

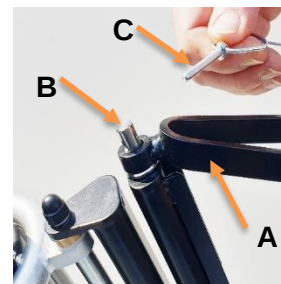

Vždy namontujte oba zajišťovací prvky - křídlové šrouby i pojistné závlačky! Pokud některý z těchto prvků není namontován podle návodu, může se spojka z jízdního kola uvolnit. Pravidelně kontrolujte pevné usazení křídlových šroubů a pojistných závlaček, nejlépe před každou jízdou.

Poté vyvěste vzpěru z čepu a zavěste ji pomocí závěsného popruhu (G) k sedlu nebo k nosiči zavazadel (H). Alternativně lze použít volitelný závěsný držák (viz bod 6), který se upevní na nosič zavazadel. Připojení „follow-me Multiroller“ tak bezpečně visí na rodičovském kole, pokud se právě nepoužívá.

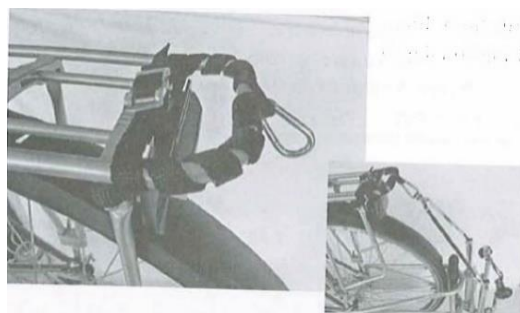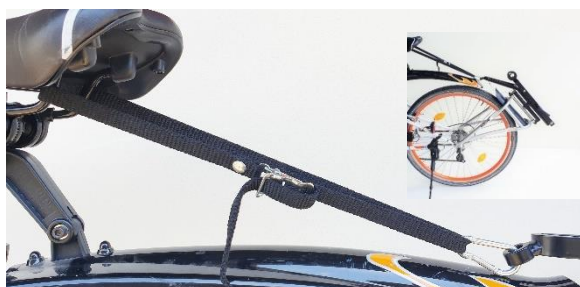




4.6 Připojení k variantě Jogger

Připojení „follow-me Multiroller“ musí být před použitím nastaveno tak, aby bylo zajištěno bezpečné používání. Dodržujte následující pokyny.

Výchozí stav:

Připojení „follow-me Multiroller“ je zavěšeno pomocí závěsného popruhu (A) u sedla.

- Nejprve odstraňte kolo Jogger z Multirolleru.
- Uvolněte vzpěru (B) z karabiny (C) závěsného popruhu (A).
- Vytáhněte pojistný kolík (D).
- Vyklopte vzpěru (B) a zavěste ji do čepu (E), aby byla vzpěra v čepu (E) zajištěna.
- Zajistěte vzpěru (B) v čepu (E) pojistným kolíkem (D).
- Ujistěte se, že se pružný kroužek zcela uzavře. Pokud ne, otočte závlačku o 180° a pružný kroužek znovu uzavřete.
- Povolte obě sklopné upínací páky (F) vpravo a vlevo na rámu připojení „follow-me Multiroller“ a zasuňte rám Jogger pod upínací páky (F).
- Obě upínací páky (F) lehce dotáhněte a zatlačte rám připojení „follow-me Multiroller“ nahoru tak, aby zaoblení (G) upínacího dílu dosedlo na příčnou vzpěru.
- Zařízení uzavřete sklopením dopředu, dokud nezapadne pružinová západka. Ujistěte se, že je západka zcela zajištěna.
- Nakonec pevně dotáhněte obě upínací páky (F), které fixují rám Jogger v držáku kola.

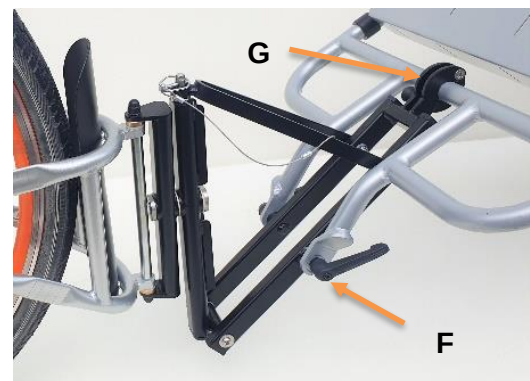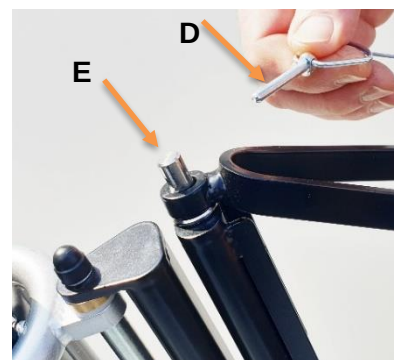
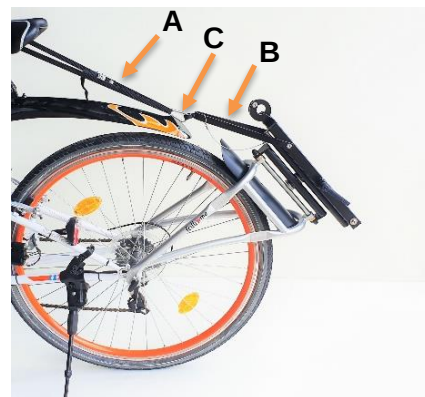


5. Připojení a odpojení během cesty

Připojení „follow-me Multiroller“ umožňuje uživateli Multiroller během cesty připojit nebo odpojit. Ve výchozím stavu je připojení pomocí závěsného popruhu nebo závěsného držáku zavěšeno nahoře. Pro připojení postupujte následovně:

- Uvolněte vzpěru (A) z karabiny závěsného popruhu nebo závěsného držáku.
- Volný závěsný popruh oviňte kolem sedlové trubky a karabinu zavěste do konstrukce sedla.
- Vyklepte vzpěru (A), vytáhněte pojistný kolík z čepu a zavěste vzpěru do čepu (B).
- Zajistěte vzpěru (A) v čepu (B) pojistným kolíkem (C).
- Ujistěte se, že se pružný kroužek zcela uzavře. Pokud ne, otočte závlačku o 180° a pružný kroužek znovu uzavřete.
- Odpojení se provádí jednoduše v opačném pořadí.

Nyní lze Multiroller a tažné jízdní kolo používat nezávisle na sobě.

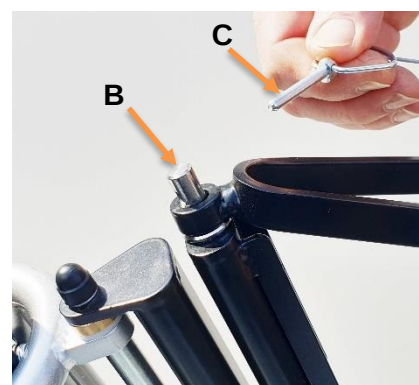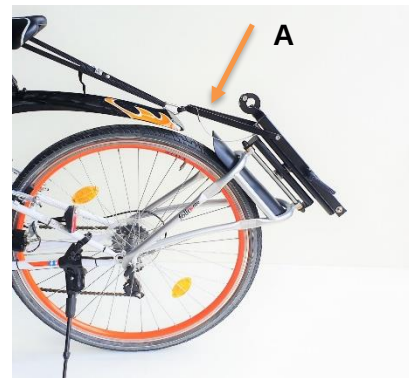


6. Příslušenství (volitelné)


Závěsný držák pro nosič zavazadel s „Top-Light“ včetně karabiny



Zasuňte závěsný držák podle obrázků A a B.

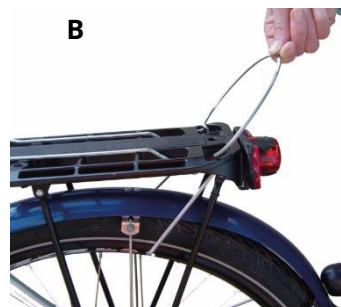

Otočte konce závěsného držáku kolem okraje nosiče zavazadel (C) a zasuňte konce nahore (D).

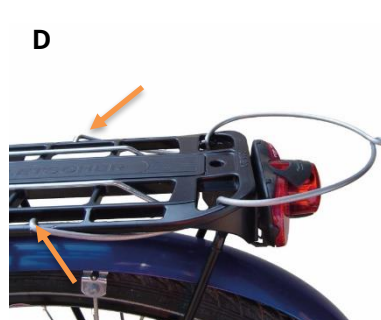

Držák můžete navíc zajistit stahovací páskou (E).

Nyní lze připojení „follow-me Multiroller“ zavěsit na držák pomocí karabiny (F).



7. Čištění a údržba

7.1 Péče

Pro zachování funkční bezpečnosti a vzhledu výrobku je nutná pravidelná péče. Dodržujte následující pokyny:

- Nečistoty nenechávejte zaschnout; vždy je odstraňte vodou a měkkým hadříkem nebo houbou. K mytí nepoužívejte vysokotlaký čistič.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Jako čisticí prostředek použijte jemný mýdlový roztok.
- Jízdní kolo s připojením „follow-me Multiroller“ skladujte, zejména v zimě, v suché místnosti se stálou teplotou.

7.2 Údržba

Provádějte každodenní vizuální kontrolu a pravidelně kontrolujte spojení rodičovského kola s dětským vozíkem, zda nevykazuje praskliny, zlomené či chybějící díly nebo poruchy. Při závadě nebo poruše se obraťte přímo na dodávajícího odborného prodejce (viz bod 10.2).

7.3 Náhradní díly

Při objednávání náhradních dílů se obraťte na dodávajícího odborného prodejce (viz bod 10.2).

8. Technické údaje

Rozměry

Požadovaná velikost tažného kola	26" - 28"
Max. tažná hmotnost	80 kg
Hmotnost	4,5 kg
Číslo položky	BRMUL/5035

9. Záruka

9.1 Doba záruky

Záruka na tento výrobek činí 24 měsíců od zakoupení. Uschovejte prosím prodejní doklady s datem. Pro uplatnění záručních nároků se obraťte na svého odborného prodejce, který za Vás zahájí veškeré další potřebné kroky.

9.2 Omezení záruky

Tato záruka se nevztahuje na škody vzniklé nedbalostí, chybným nebo nesprávným používáním, použitím neoriginálních dílů nebo nesprávným zacházením v důsledku nedodržení tohoto návodu k použití. Vyloučeny jsou rovněž škody způsobené nehodou. Nárok ze záruky zaniká také tehdy, pokud ve formuláři záruky chybí jméno a razítko odborného prodejce, od kterého jste připojení „follow-me Multiroller“ obdrželi, nebo pokud formulář pro uplatnění záruky nemůžete předložit.

9.3 Formulář pro uplatnění záruky

Model výrobku / číslo:	Připojení k jízdnímu kolu „follow-me Multiroller“
Jméno, příjmení:	
Ulice a číslo domu:	
Město:	
PSČ:	
Telefonní číslo:	
E-mailová adresa:	
Datum nákupu:	
Odborný prodejce:	

10. Identifikace

10.1 Vydání dokumentu

Návod k použití připojení k jízdnímu kolu „follow-me Multiroller“ - stav změny I; vydání 01/2024

10.2 Název a adresa výrobce, dodávající odborný prodejce

Výrobce:

RehaNorm GmbH & Co. KG,
Am Ockenheimer Graben 50,
55411 Bingen

Německo

Telefon +49 6721 906 0,

Telefax +49 67 21 906 66,

E-mail: info@rehanorm.de,

www.rehanorm.de

Tento výrobek dodal následující odborný prodejce:

--